

半固形・とろみタイプ 栄養食 仕様変更に伴う事前準備のお願い

2021年6月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、半固形タイプのPGソフトEJ、PGソフトエース、PGソフトエースMP PGウォーター、とろみタイプのF2ショットEJ、F2ライト、F2ライトMP、F2ライト55、につきまして、2021年6月以降順次仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

また今回、他製品切り替えの時期によりますが、食品容器の仕様変更に伴い**経管投与等を行う場合においては、そのままでは接続チューブに使用できなくなる可能性**があり、事前に「変換コネクタの準備」「新製品への切替」について、かかりつけ医等にご相談をお願い致します。

謹白

記

■概要

- ①仕様変更の背景
- ②事前確認と準備のお願い

■①仕様変更の背景


国際ルールの変更に伴い、経管栄養に使用するチューブ(栄養チューブ)、延長チューブ、栄養剤等の接続部分の形状が変更されます。このお知らせをよく確認いただき、ご理解・ご協力をお願いします。

【なにが変わるのですか？】

誤って栄養チューブと点滴チューブをつないでしまうと重大な健康被害が発生する可能性があります。栄養チューブと点滴チューブ等がつかないよう、接続部分(右図赤丸部分)の形状が変わります。




【経管投与等を行う場合において、そのままでは接続チューブに使用できなくなる可能性があります】

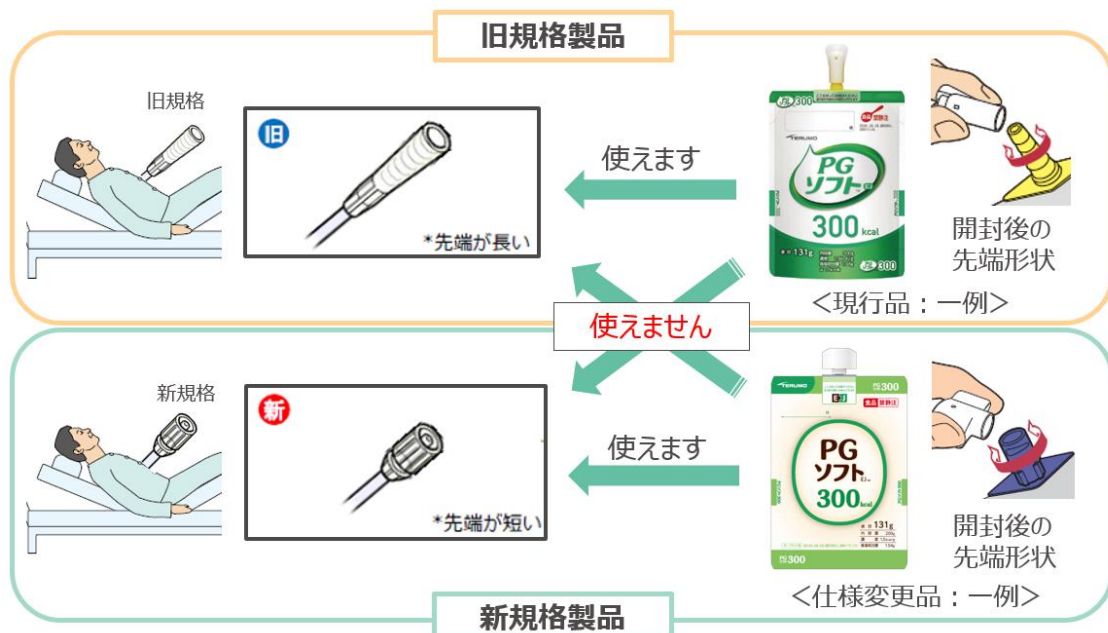

②事前確認と準備のお願い

・現在のあなたのタイプ(A～D)を教えてください。

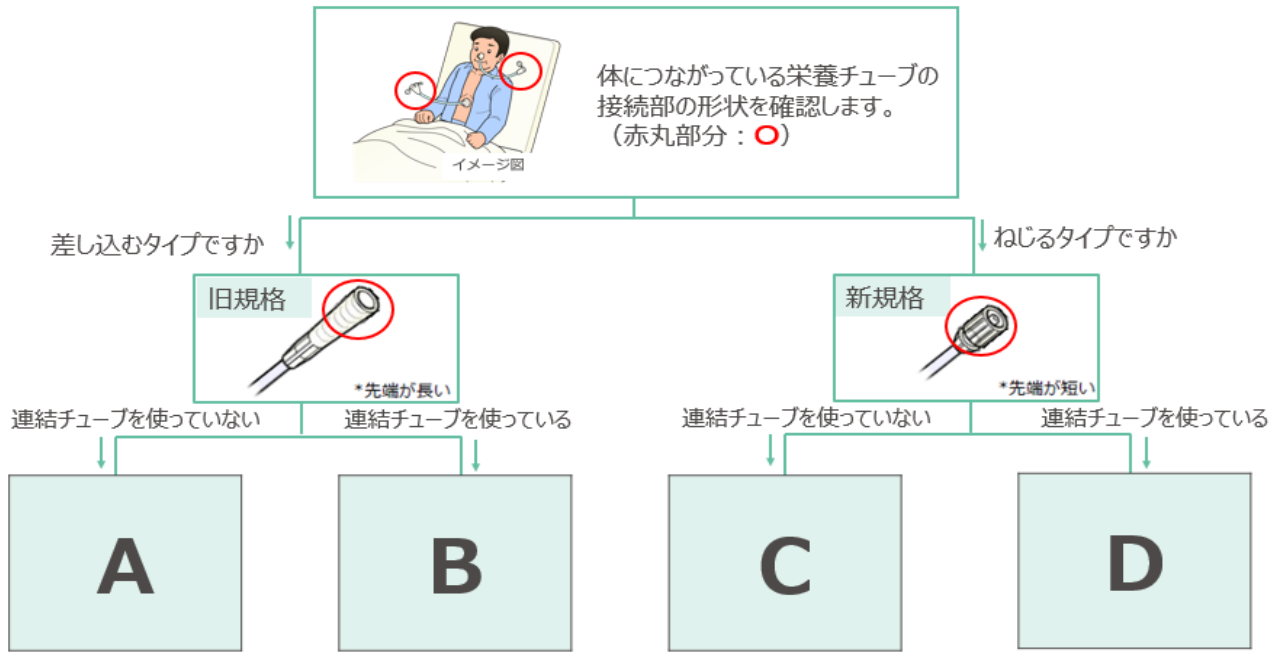

・タイプ(A～D)がわかりましたら、その内容をご確認し、かかりつけ医や看護師に御相談ください。

あなたのタイプ	準備	相談すること
A	<p>旧規格</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧規格のチューブ (栄養チューブ) 等 	<p>新規格の対応が必要です。 使用している製品の変更、旧規格、新規格の製品をつなぐ変換コネクタの要否及び準備については、かかりつけ医や看護師にご相談ください。</p> <p><準備するもの：例></p> <ul style="list-style-type: none"> ・変換コネクタ (Bタイプ)
B	<p>旧規格</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧規格のチューブ (栄養チューブ) 等 ・連結チューブ 	<p>新規格の対応が必要です。 使用している製品の変更、旧規格、新規格の製品をつなぐ変換コネクタの要否及び準備については、かかりつけ医や看護師にご相談ください。</p> <p><準備するもの：例></p> <ul style="list-style-type: none"> ・変換コネクタ (Bタイプ) ・連結チューブ (新規格)
C	<p>新規格</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規格のチューブ (栄養チューブ) 等 	<p>準備は不要です。 仕様変更品は新規格の製品に直接使用できます。</p>
D	<p>新規格</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規格のチューブ (栄養チューブ) 等 ・連結チューブ 	<p>新規格の対応が必要です。 使用している製品の変更、旧規格、新規格の製品をつなぐ変換コネクタの要否及び準備については、かかりつけ医や看護師にご相談ください。</p> <p><準備するもの></p> <ul style="list-style-type: none"> ・連結チューブ (新規格)

※なお、準備に時間を有する場合には弊社までお問い合わせください。

テルモ・コールセンター：0120-12-8195

月曜～金曜日 9:00～17:45(土日・祝日・会社休日を除く)