

半固形・とろみタイプ 栄養食 容器変更に伴う取り扱いとお願い

2021年6月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、半固形・とろみタイプ栄養食容器の取り扱いに関する注意事項についてご案内申し上げます。

謹白

記

① 箱からの取り出し




・箱から取り出す際は容器を持って取り出して下さい。

【注意点】

- ・箱から取り出す際にキャップをつまみ、持ち上げないでください。
- ・キャップが外れる原因になります。


② 容器のキャップ開栓

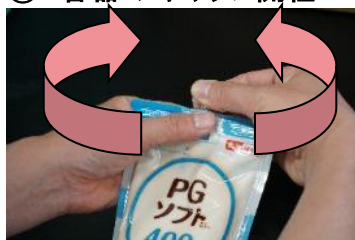

- ・開栓時は「ここを持ってお開けください」(栄養食の両面に記載)の箇所をお持ちください。袋の部分を握ると中身が飛び出す可能性があります。
- ・開栓する場合、キャップを左右どちらかに 180° 回転させて下さい。

【コツと注意点】

- ・少し下向きに押しながら回転させてください。
- ・キャップを上方向に引きながら回転させるとキャップが外れ、開栓出来なくなる可能性があります。その他に、先端の部品の脱落が生じる可能性があります。

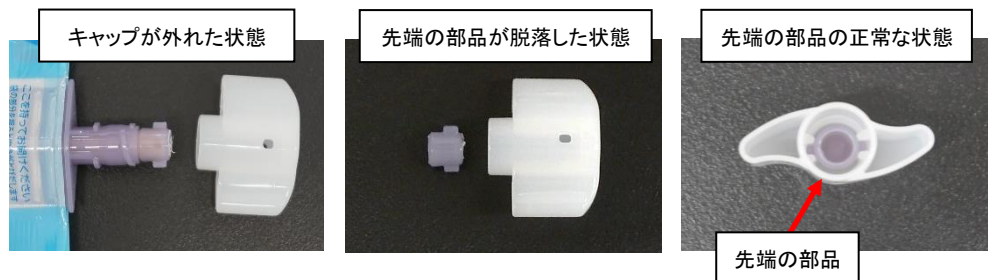

- ・開栓後、容器先端内の液が硬くなっている場合があります。その場合はその部分を捨ててご使用下さい。

■その他

I. チューブを接続して用いる場合

①チューブ接続




- ・チューブに接続する際はチューブ側を保持し、容器側を回して接続してください。

【注意点】

- ・チューブ側を回した場合、ねじれや折れが生じる可能性があります。
- ・接続は過度な締め付けを避けてください。
チューブから外れなくなる、または破損の原因となります。

②栄養食押し出し/チューブ取り外し

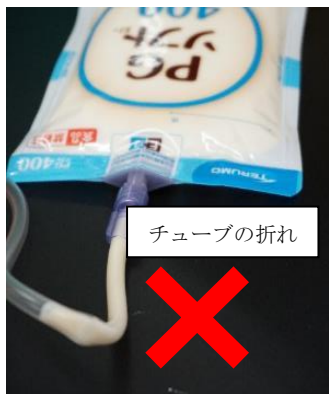

- ・チューブが折れていない、ねじれていないことを確認してから、押し出しを開始してください。



- ・取り外す際はチューブを保持し、容器側を回転させてください。




【注意点】

- ・取り外し後は、チューブの破損および接続部の汚れの有無をご確認ください。
- ・汚れを認めた場合は、流水やブラシ等で洗浄してください。

<チューブが新規格でない場合>

旧規格

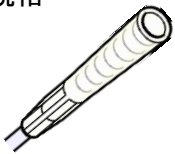


変換コネクタを用いる場合

- ・接続できない可能性があります。
- ・使用しているチューブの変更または現状のチューブとつなぐための変換コネクタ準備等をおかかりつけ医および看護師にご相談ください。
- ※なお、準備に時間を有する場合には弊社までお問い合わせください。



回数は、先端のキャップを左右どちらかに180°回転させ、キャップを取り外してください。

①食品容器のキャップを開封

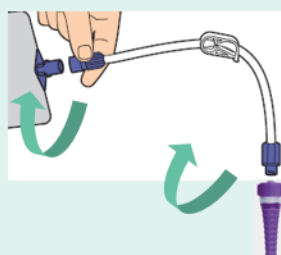

②EJ連結チューブⅡと変換コネクタを回して装着



③準備完了

※装着時、過度な締め付けは避けてください。破損の原因になります。

II. 吸い口を用いる場合

容器に吸い口(新EJ容器専用)を用いる場合



回栓は、先端のキャップを左右どちらかに180°回転させ、キャップを取り外してください。

容器へ装着する部分はこちら

※装着時、過度な締め付けは避けてください。
破損の原因になります。



※吸い口が汚れた場合は、清掃してください。

■ 現在、より使いやすい吸い口を準備中です。

使用方法等でご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。
テルモ・コールセンター：0120-12-8195
9:00～17:45(土日・祝日・会社休日を除く)