


●キットの内容及び成分・分量

●内容 検査薬はスティックの先のほうに貼り付けられています。

スティック
トイレに流せます。
折れやすいので
ご注意ください。

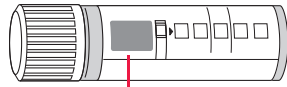

色調表 (容器ラベルに印刷)
検査結果を判定するときに、検査薬の
色の变化を見るのに使います。



尿糖検査薬 (黄色)
検査薬には触れな
いください。

●成分・分量

検査薬に含まれる主な成分 (100枚あたり)
尿糖検査薬 グルコースオキシダーゼ……53.3IU
ペルオキシダーゼ……0.63mg
o-トリジン……24.8mg

●保管及び取扱い上の注意



高温の所、直射日光のあたる場所に
保管しないでください。
検査薬が使えなくなる原因となります。



密栓をして保管してください。
密栓をしないと検査薬が使えな
くなる原因となります。



水にぬれる所で保管しないで
ください。
検査薬が使えなくなる原因となります。

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 必要な枚数の検査薬だけを取り出し、直ちに容器のフタをきちんと閉めて保管してください。フタの閉め方が不十分な場合、検査薬が湿気を吸って、使用期限内でも正しく検査できなくなります。
- 開封後はなるべく早めに使用してください。
- 容器フタ裏側に入っている乾燥剤は取り出さないでください。

- 検査薬に直接皮膚を触れないでください。
- 品質を保持するために、他の容器に入れ換えしないでください。
- 使用前の検査薬の色調が変化している場合や、吸湿お知らせ窓の色が変化している場合には、検査薬の成分が劣化している可能性がありますので使用しないでください。
- スティックは、はさみ等でカットせずにご使用ください。検査薬がスティックからはがれたり、切断中に試薬が劣化し、正しい結果が得られない可能性があります。
- 使用期限の過ぎたものは使用しないでください。
- 保管時、フタの開閉時、水ぬれを避けてください。

●保管方法・有効期間

1. 保管方法：室温保存 (直射日光及び湿気を避け密栓して涼しい所に保管してください)
冷蔵庫に保管しないでください。
2. 有効期間：2年 (使用期限は色調表及び外箱に表示)

●包装単位 30枚入り 50枚入り


●消費者相談窓口

この検査薬に関してのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡ください。

この尿検査薬は新ウリエースGaです。

TERUMO テルモ株式会社

<http://www.terumo.co.jp/consumer/>

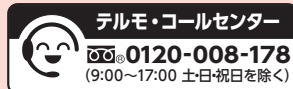

TERUMO

新ウリエースGa

一般用検査薬 尿糖検査薬
第2類医薬品 一般用グルコースキット

この添付文書をよく読んでからお使いください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

●製品の特徴

身体の健康状態や体内の機能に変化や異常があると、尿中に含まれる成分も変化します。その尿中の成分を検査することによって、体内の変化や異常をチェックできます。新ウリエースGaは尿中の糖を検出する検査薬ですので、定期的に使用し、健康管理や早期受診にお役立てください。(本検査は尿中の糖を検出するものであり、病気の診断を行うものではありません。)



●使用上の注意

してはいけないこと 検査結果から自分で病気の診断をしないこと。「尿糖」が検出された場合にはできるだけ早く医師の診断を受けてください。

相談すること ①「尿糖」が検出された場合には医師にご相談ください。
②「尿糖」が検出されなくても、何らかの症状がある場合には医師にご相談ください。
③医師の治療を受けている人はご使用前に(担当)医師(又は薬剤師)にご相談ください。

その他の注意 ①判定後のスティックはそのままトイレ(大便器)に流すことができませんが、小用便器には流さないでください。
②検査結果(検査した年月日・時刻・結果等)を記録しておくことをおすすめします。

●使用目的 尿中の糖(ブドウ糖)の検出


●使用方法

検査の時間

- 原則として食後(1~2時間)の尿で検査をしてください。
※食後とは食べ始めた時間からをさします。

検査前の注意

- 尿検査以外に使わないでください。
- 尿は始めや終わりのものは使わず、途中の尿(中間尿)で検査してください。
- 時計(30秒が計れるもの)を用意してください。
- 吸湿お知らせ窓の色を見て、使えるかどうかの確認をしてください。
- 食事の前に排尿してください。

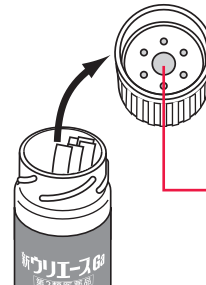

吸湿お知らせ窓 (容器のフタ裏側)

- 青~うすい青……○検査薬は使えます。
- 白~うすいピンク…×検査薬は使えなくなりました。
※奥には乾燥剤が入っていますが、取り出さないでください。