



●キットの内容及び成分・分量

●内容 検査薬はスティックの先のほうに貼り付けられています。

スティック
トイレに流せます。
折れやすいので
ご注意ください。

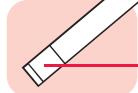

尿たん白検査薬
(薄黄色)
検査薬には触れな
いください。

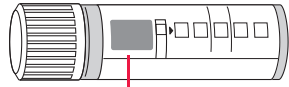

色調表 (容器ラベルに印刷)
検査結果を判定するとき、検査薬の
色の变化を見るのに使います。

●成分・分量

検査薬に含まれる主な成分 (100枚あたり)
尿たん白検査薬
テトラプロムフェノールブルー……………0.44mg

●保管及び取扱い上の注意



高温の所、直射日光のあたる場所
に保管しないでください。
検査薬が使えなくなる原因となります。



密栓をして保管してください。
密栓をしないと検査薬が使えな
くなる原因となります。



水にぬれる所で保管しないで
ください。
検査薬が使えなくなる原因となります。

- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・必要な枚数の検査薬だけを取り出し、直ちに容器のフタをきちんと閉めて保管してください。フタの閉め方が不十分な場合、検査薬が湿気を吸って、使用期限内でも正しく検査できなくなります。
- ・開封後はなるべく早めに使用してください。
- ・容器フタ裏側に入っている乾燥剤は取り出さないでください。

この尿検査薬はマイウリエースTです。

TERUMO テルモ株式会社

<http://www.terumo.co.jp/consumer/>



テルモ・コールセンター

☎0120-008-178

(9:00~17:00 土日祝日を除く)

製造販売元：テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号

記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。 ©テルモ株式会社 2021年2月

2017

TERUMO

マイウリエースT

一般用検査薬 尿たん白検査薬
第2類医薬品 一般用総蛋白キット

この添付文書をよく読んでからお使いください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

●製品の特徴

身体の健康状態や体内の機能に変化や異常があると、尿中に含まれる成分も変化します。その尿中の成分を検査することによって、体内の変化や異常をチェックできます。マイウリエースTは尿中のたん白を検出する検査薬ですので、定期的を使用し、健康管理や早期受診にお役立てください。(本検査は尿中のたん白を検出するものであり、病気の診断を行うものではありません。)



●使用上の注意

してはいけないこと 検査結果から自分で病気の診断をしないこと。「尿たん白」が検出された場合にはできるだけ早く医師の診断を受けてください。

相談すること ①「尿たん白」が検出された場合には医師にご相談ください。
②「尿たん白」が検出されなくても、何らかの症状がある場合には医師にご相談ください。
③医師の治療を受けている人はご使用前に(担当)医師(又は薬剤師)にご相談ください。

その他の注意 ①判定後のスティックはそのままトイレ(大便器)に流すことができませんが、小用便器には流さないでください。
②検査結果(検査した年月日・時刻・結果等)を記録しておくことをおすすめします。

●使用目的 使用者が自ら尿検体を採取し、自らの健康管理の指標として、尿中総蛋白(主にアルブミン)の測定に使用する。


●使用方法

検査の時間

●原則として早朝尿(起床直後の尿)で検査をしてください。

検査前の注意

- 尿検査以外に使わないでください。
- 尿は出始めや終わりのものは使わず、途中の尿(中間尿)で検査してください。
- 時計(秒数が計れるもの)を用意してください。
- 吸湿お知らせ窓の色を見て、使えるかどうかの確認をしてください。

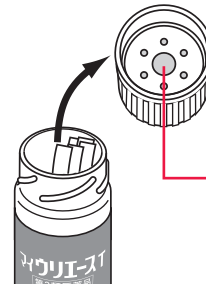

吸湿お知らせ窓 (容器のフタ裏側)

- 青~うすい青……………○検査薬は使えます。
 - 白~ピンク……………×検査薬は使えなくなりました。
- ※奥には乾燥剤が入っていますが、取り出さないでください。