

テルモ電子体温計W525

【警告】<使用方法>


- ・電池や電池カバーは子供の手に届かない所に置いてください。
 - ・子供だけで使わせないでください。
- [本製品の先端部をかみ切って飲み込んだり、けがをする可能性があります。]

【禁忌・禁止】<使用方法>

- ・引火性のある環境では使用しないでください。
- [引火又は爆発の誘因となる可能性があります。]

**【形状・構造及び原理】

** 1. 各部の名称

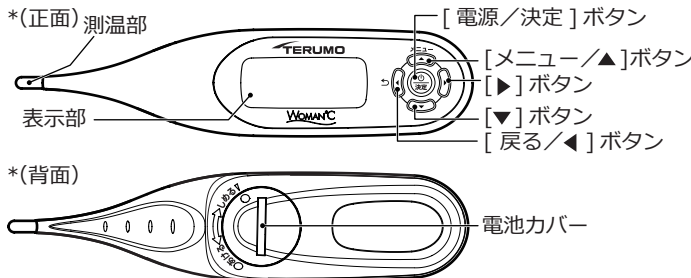

** 付属品: 収納ケース、リチウムボタン電池(CR2032) 1個(内蔵)、取扱説明書/品質保証書、EMC技術資料

2. 体に接触する部分の原材料

- ・測温部: SUS 304 ステンレススチール
- ・本体: ABS樹脂

3. 本体の寸法及び重量

- ・外観寸法: 約長さ133mm × 幅31mm × 厚さ19mm
- ・質量: 約30g(電池含む)

4. 電気的定格

- ・電源: リチウムボタン電池(CR2032) 1個(交換可)
- ・電圧: DC3V
- ・消費電力: 約4.0mW
- ・分類: 内部電源機器・BF形装着部(人)・IPX7

5. 電池寿命

- ・1日1回、周囲温度25℃、5分間の使用で約1年
- ・使用済みの電池や体温計を廃棄する際は、各自治体のルールに従って適切に廃棄してください。

6. 原理

本製品は、人の体温を測定するための装置であり、測温部、本体、ボタン、表示部等からなり、測温部に伝わった温度を感温素子により電気量に変換し、その電気量をLSIにより演算処理し、平衡温を予測した後、測定値をデジタル表示する。

7. 仕様に係る事項

- ・測温範囲: 32.00 ~ 42.00℃
- ・温度精度: 最大許容誤差 ± 0.05℃ (35.00 ~ 38.00℃の範囲)
± 0.10℃ (上記以外の測定範囲)
(恒温水槽で実測測定した場合)
- ・使用条件: 周囲温度 10 ~ 40℃
相対湿度 30 ~ 85%RH (ただし結露なきこと)

【使用目的又は効果】

本製品は、測温部を部位に接触させて、口腔(舌下)の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示する。

*【使用方法等】

【使用開始前の準備】

- (1) 収納ケースから体温計を取り出し、[電源/決定] ボタンを押して電源を入れる。
- (2) 現在の年月日及び時刻と、毎日の測定時刻を設定する。
- (3) [電源/決定] ボタンを押して(2秒以上)電源を切る(電源を切り忘れても約3分後に自動的に電源が切れる)。

*【測定方法】

- (1) 測定時刻に鳴るアラームを[電源/決定] ボタンを押して止める。
- (2) 舌下中央のすじの横に体温計の先端(測温部)をあてる。
- (3) 舌を下げ、口を軽く閉じる。
- (4) 最初のブザー(約20秒)が鳴ったら測温部を口から取り出す(予測検温)。2度目のブザー(約5分)が鳴ったら測温部を口から取り出す(実測検温: 検温開始から約2分30秒後に実測値表示に自動切替)。より厳密な体温を測定するには、実測検温を行うこと。
※婦人体温計は実測検温することが望ましいと言われている。
- (5) 生理、発熱があった場合、生理メモ、発熱メモを入力する。
- (6) [電源/決定] ボタンを押して(2秒以上)電源を切る。
- (7) ご使用後は乾いた布等で水気をふき取って、清潔な状態で付属の収納ケースに収めて保管する。
- (8) 電池交換の方法は、取扱説明書を参照する。

**【使用上の注意】

- (1) 人の体温測定以外に使用しないこと。
 - (2) 口腔(舌下)用です。口腔(舌下)以外で検温しないこと。
 - (3) 使用前に、外観に破損がないことを確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。
 - (4) 正しい方法で検温を行わなかった場合、予測精度が保証されない可能性があります。検温を始める前に、次の点に気を付けてください。
 - ・毎朝の基礎体温の検温は、寝ている状態のまま体を動かさず、なるべく同じ時間帯に検温してください。
 - ・検温中は本体を指で支え、会話や口での呼吸等で口を開けたり、体を動かしたりしないでください。
 - ・くり返し検温するときは、少し時間を置くなど体温計の先端(測温部)を冷ましてから検温してください。
 - (5) 検温値を自動記録するため、必ず現在の日付・時刻と測定する時刻(アラーム)を設定すること。(電池交換後は、再度設定すること。)
 - (6) 検温結果の自己診断、治療は行わないこと。
 - (7) 他の機器と併用するときは、影響の有無を確かめること。誤作動する場合には併用しないこと。
 - (8) 本製品は、衝撃、振動、塵埃、噴霧、腐食性ガス等の発生する場所で使用しないこと。
 - (9) 水中に放置したり、水道の蛇口に直接あてないこと。
 - (10) 強くかまない、踏まない、落とさない、強いショックを与えない、曲げない、引っ張らないこと。
 - (11) 分解、修理、改造は行わないこと。
 - (12) 3周期以上の体温値と体調メモに基づき次回排卵・生理予定日の確認ができる。ただし、生理周期が不安定な場合や体温変動が大きい場合は表示されないことがある。
 - (13) 次回排卵日、次回生理日の計算機能はオギノ式に基づきますが、あくまで参考として使用すること。
 - (14) 電池及び電池カバーは、乳幼児や子供等がけがをしたり、飲み込まないように十分注意すること。電池を飲み込んだ場合、化学やけどなどに至ることがありますので、直ちに医師に連絡して指示を受けること。
 - (15) 病気の治療等で薬物を使用している場合は、正確な計算日を計算できないことがある。
- ** ※ 電子添文及び取扱説明書に従わない使用がなされた場合及び勝手に何らかの修理、改造、分解、再調整がなされた場合について、製造販売元及び発売元は一切の責任を負うことができないため注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

日光や紫外線等の強い光が当たる場所に保管したり、湿気が多い場所、ホコリが多い場所、腐食性のガスの発生する場所に保管しないこと。体温計は、先端部を守る目的で、収納ケースに収めて保管してください。長期間使用しない場合、電池は取り外して保管すること。

2. 耐用期間

標準的な耐用期間の目安: 5年[自己認証(当社データ)による。]

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本体と収納ケースを洗う際には、水で洗うこと。水洗いを行う場合は、洗面器等に溜めた水にボタンを押さないように体温計を浸し、取り出してから汚れをふき取るようにすること。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で汚れを落とす後、洗剤をよくふき取ること。
- (2) 消毒する場合は、表示部を除く本体を消毒用アルコール綿で清拭して自然乾燥させること。
- (3) 消毒液等に浸さないこと。
- (4) 超音波洗浄はしないこと。
- (5) 熱湯消毒(50℃以上)はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: シチズン・システムズ株式会社
製造元: 西鉄城精電科技(江門)有限公司
CITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO., LTD.
中華人民共和国

発売元: テルモ株式会社

お問い合わせ先

テルモ・コールセンター

電話: 0120-008-178 (9:00 ~ 17:00 土・日・祝日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください