

機械器具 16 体温計
管理 電子体温計（JMDN コード：14032010）

テルモ社内管理コード




ET44J205SC

テルモ電子体温計 C205

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

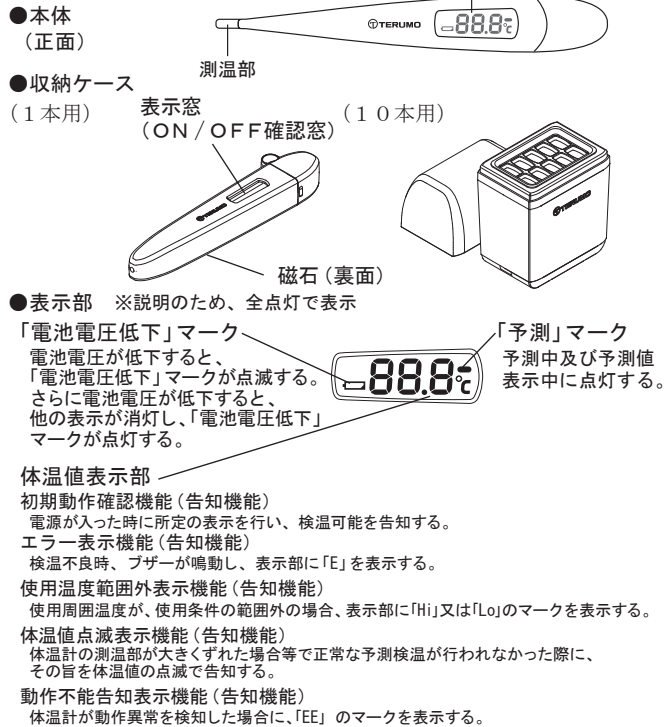

外観寸法：長さ 129mm × 幅 17.6mm × 厚さ 12.6mm
質 量：約 13.0g（電池含む）
付 属 品：添付文書 / EMC 技術資料、収納ケース

<原理>

本品は、サーミスタの抵抗変化を利用して温度を検出し、検温開始から約 4 分 30 秒までは予測値、それ以降は実測値の最高値をデジタルで表示する。検温中は、平均約 30 秒（おおよそ 25 秒～40 秒）で予測が成立したことを知らせるブザーが鳴り、検温をそのまま続けると約 10 分後に実測検温終了のブザーが鳴る。

【機器の分類】 内部電源機器 B F 形装着部 I P X 7

【電気的定格】

電 源：アルカリマンガン電池（LR41）2 個（交換不可）
電 圧：DC 3.0 V 消費電力：約 0.3 mW
本品は EMC 規格 IEC 60601-1-2:2004 に適合している。 EMC 適合

【使用目的、効能又は効果】

<使用目的>

測温部を部位に接触させて、腋窩の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。

【品目仕様等】

【特性・性能又は機能に関する規格】

- ・最高温度保持機能：実測表示に切替後は、実測した最高の温度値を保持し、検温を終了しても電源が OFF されるまで表示を維持する。
- ・デジタル表示：3 桁
- ・最大許容誤差（温度指示精度）：± 0.1℃以内（標準温度計に対して）
- ・電源電圧：JIS T 1140:2005 に適合
- ・防 浸：JIS T 1140:2005 に適合
- ・測温範囲：32.0 ～ 42.0℃
- ・最小表示単位：0.1℃
- ・測温範囲外告知：測定温度が 42.0℃を超えると表示部に「0」を表示する。

【その他の仕様】

種 類：一般用 測温部一体形 防浸形

測温方式：予測式（予測検温・実測検温兼用）

検温部位：腋窩

使用条件：周囲温度 10 ～ 40℃ 相対湿度 30 ～ 85% RH（ただし、結露なきこと）

【操作方法又は使用方法等】

【測定方法】

1. 体温計を収納ケースから取り出す。（電源が入る）
2. ワキ下中央に体温計の先端（測温部）をあてる。
3. 体温計をななめ下から 30° くらいの角度で、押し上げるようにはさみ、ワキをしっかりしめる。
4. 検温終了後、体温計を収納ケースに入れる。（電源が切れる）

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・子供だけで使わせないこと。
- ・引火性のある環境では使用しないこと。
- ・使用の前に、外観に破損等がないことを確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・以下の項目は予測 / 実測精度に影響するため、注意すること。
 - ・飲食後、運動後、入浴後、外出から帰宅後はすぐに検温せず、30 分ほど待ってから測ること。
 - ・ワキ下に汗をかいている場合は、タオル等で汗を拭き取ること。
 - ・検温中は、体を動かしたり、体温計を動かしたりしないこと。
 - ・ワキ下に強く密着させて測定すること。
 - ・くり返し検温するときは、少し時間をおくなど体温計の先端（測温部）を冷ましてから検温すること。
- ・人の体温測定以外に使用しないこと。
- ・強い静電気や電磁波、磁石等に近づけたり、近くで携帯電話を使用しないこと。
- ・本品は、衝撃、振動、塵埃、噴霧、腐食性ガス等の発生する場所で使用しないこと。
- ・分解、修理、改造は行わないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

- ・暖房器具のそば、車の中、日光のあたるところ、ほこりの多いところ、湿気の多いところを避けて保管すること。
- 保管条件：周囲温度 -10 ～ 50℃ 相対湿度 30 ～ 95% RH（ただし、結露なきこと）

【保管上の注意】

- ・電池の寿命が短くなるので、必ず収納ケースに収めて保管すること。

【電池寿命について】

- ・予測検温にて、約 10,000 回使用することができる。
- ・体温計を廃棄する際は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）に従って適切に廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

【保守点検上の注意】

- ・本体と収納ケースを洗う際は、水で洗うこと。収納ケースに収める際、乾いた布等で水気を拭き取ること。
- ・消毒する際は、消毒用アルコール綿で清拭して自然乾燥させること。他の方法での消毒はしないこと。
- ・必要時間以上、消毒液につけないこと。必要な時間については消毒液の添付文書を参照すること。
- ・熱湯消毒（50℃以上）しないこと。

【包装】

- ・1 個／箱 （コード番号：ET-C205S）
- ・10 個／箱 （コード番号：ET-C205H）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：テルモ株式会社
住 所：東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 44 番 1 号
電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

製 造 業 者：テルモ株式会社

外国製造所の名称：泰尔茂医療産品（杭州）有限公司
Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd.
国 名：中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。

