

テルモたいおんアプリ™

取扱説明書

[目次](#)[基本操作](#)[注意](#)[その他の機能](#)[はじめに](#)[困ったときは](#)[準備](#)

この取扱説明書では、テルモたいおんアプリのセットアップ、使用方法の概要について説明しています。説明および各注意事項をご確認・ご承諾のうえ、ご使用ください。「使用上のご注意」(P.5)、「重要な注意事項」(P.7) はご使用前に必ずお読みください。

注意 5

使用上のご注意.....5

はじめに 6

テルモたいおんアプリについて.....7

通信できる機器.....7

動作環境 / 仕様.....7

重要な注意事項.....7

画面の各部の名称と機能.....8

一般体温モード.....8

基礎体温モード.....11

共通.....14

準備 16

アカウントを新規登録する.....17

体温計とペアリングする.....23

基本操作	26
ログイン／ログアウトする	27
ログインする	27
ログアウトする	28
体温測定値を記録する	29
体温計と連携し、測定データを保存する	29
体温測定値を手入力で追加する	31
未取り込みデータを取り込む	37
測定値の記録を編集・削除する	38
編集する	38
削除する	39
その他の機能	40
データを出力する	42
他アプリとデータ連携する	44
Apple ヘルスケアとデータ連携する (iOS)	44
Google™ ヘルスコネクトとデータ連携する (Android)	45
ユーザーを管理 (追加・編集・削除) する	46
管理ユーザーを追加する	46
管理ユーザーを編集する	48
管理ユーザーを削除する	49
機器を管理 (登録・設定・削除) する	50
機器を登録し、ユーザーに紐づける	50
登録機器を設定する	53
登録機器を削除する	54

アカウントを設定する	55
ID（登録メールアドレス）を変更する	55
パスワードを変更する	57
パスワードを忘れたときは	58
アカウントを削除する	59
表示モードなどのプロフィールを確認、変更する	60
ログイン方法を変更する（セキュリティ設定）	62
アプリをアップデート・アンインストールする	63
アプリをアップデートする	63
アプリをアンインストールする	63
その他の情報を確認する	64
アプリの情報を確認する	64
アプリの使用方法を閲覧する	65
お問い合わせ方法を確認する	66
困ったときは	67
アプリから問い合わせる	68
お問い合わせ窓口	69
こんなときは	69
エラーメッセージ一覧	71
製品についてのご相談やお問い合わせは	73

本アプリを安全に正しくお使いいただくために、下記の表示を用いて注意喚起をしています。

注 意

使用にあたり、一般的な注意を表示します。

- ・ 誤って使うと障害を負う可能性、又は物的損害の発生が想定されます。

使用上のご注意

注 意

- 1) ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、記述されている説明に従って正しく使用してください。
- 2) 本アプリを使用する前には次の事項に注意してください。
 - (1) 本アプリを稼働するスマートフォンの点検を行い、正確に作動することを確認してください。
 - (2) 他のアプリケーションと同時に使用する場合は、本アプリの誤動作をまねく恐れがあるので、十分注意してください。
- 3) 動作異常があったときは自己判断で操作せず、テルモたいおんアプリに関するお問い合わせ窓口までご連絡ください。
- 4) ツール等を使用してデータベースにアクセスしないでください。
- 5) 使用時点検は、次の事項を守ってください。
 - (1) しばらく使用しなかった本アプリを再び使用するときは、使用前に必ず正常にかつ安全に動作することを確認してください。
 - (2) スマートフォンの時刻が正しいことを確認してください。
- 6) 本アプリを使用するには、インターネット環境が必要です。使用前に通信状態をご確認ください。
- 7) ログイン ID（メールアドレス）とパスワードは、ご自身およびアカウントを共有する方において、適切に管理してください。
- 8) アカウント情報、ユーザー情報および測定データについて、編集および削除するとともに戻せません。編集前および削除前にご確認の上、操作を実行してください。
- 9) 本アプリの改造をしないでください。[異常動作を引き起こす可能性があります。]

ここでは、テルモたいおんアプリをお使いになる前に知っておいていただきたいテルモたいおんアプリの概要、重要な注意事項、画面の各部の名称と機能について説明します。

テルモたいおんアプリについて

通信できる機器

動作環境 / 仕様

▶ 7

重要な注意事項

▶ 7

画面の各部の名称と機能

一般体温モード

カレンダー画面

グラフ画面

データノート画面

基礎体温モード

カレンダー画面

グラフ画面

データノート画面

共通

体温記事画面

メニュー画面

▶ 8

テルモたいおんアプリについて

テルモたいおんアプリはスマートフォンで体温測定値を管理するアプリです。体温測定値を記録し、測定結果の一覧やグラフで体温の推移を確認できます。また、専用の体温計で測定したデータを転送、受信および登録します。優先表示モードを切り替えることで一般体温および基礎体温を記録することができます。また、体温測定値の手入力、編集、削除も可能です。

通信できる機器

通信機器	製品コード	一般的名称	販売名	医療機器認証番号
体温計	ET-P210BZ	電子体温計	テルモ電子体温計 P210	305AABZX00062000
	ET-W210BZ	電子体温計	テルモ電子体温計 W210	305AABZX00063000

動作環境 / 仕様

項目	内容
アプリ名称	テルモたいおんアプリ
動作環境	基本ソフトウェア：(日本語版) iOS® 15.0 以上・Android™ 10.0 以上 ストレージ：空き容量 10GB 以上を推奨
インターネット接続環境	ブロードバンドインターネット接続環境
通信機能	Bluetooth® 通信機能

重要な注意事項

テルモたいおんアプリを使用される前に、使用許諾契約書、プライバシーポリシーを必ずお読みください。本アプリの使用には、使用許諾契約、プライバシーポリシーへの同意が必要です。対応する体温計の使用方法等については、各製品の電子添文、又は取扱説明書をご覧ください。

画面の各部の名称と機能

一般体温モード

■ カレンダー画面

ユーザー選択
選択中のユーザー名が表示されます。◇をタップすると、登録ユーザーが一覧表示され、ユーザーを切り替えられます。

タイトル
当日の体温測定日時と測定値を表示します。また、過去3か月の月平均値、当月と前月の平均値の差を表示します。

カレンダー切り替えタブ
月又は年単位に切り替えます。

画面切り替えタブ
ボタンをタップして画面を切り替えます。


データ出力
「データ出力」画面で、期間を選択し、ユーザーのデータをPDF又は画像で出力します。

ボタン
カレンダー内のアイコンの説明が表示されます。

カレンダー
体温測定や発熱の有無、イベント記録状況がカレンダーで確認できます。

ボタン
今日の日付を含む「月」のカレンダーを表示します。

(手入力) ボタン
体温の測定値を手動で入力します。

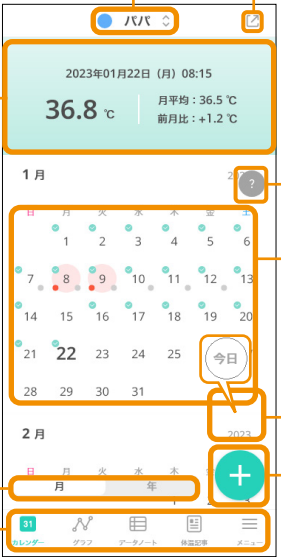

ボタン	表示画面
カレンダー	測定値カレンダー
グラフ	測定値グラフ
データノート	測定値リスト
体温記事	体温に関する情報サイトのリンク
メニュー	メニュー (アプリ設定やユーザー情報設定、登録機器等)

■ グラフ画面

ユーザー選択
 選択中のユーザー名が表示されます。◇をタップすると、登録ユーザーが一覧表示され、ユーザーを切り替えられます。

タイトル
 当日の体温測定日時と測定値を表示します。また、過去3か月の月平均値、当月と前月の平均値の差を表示します。

グラフ切り替えタブ
 以下の体温グラフを表示します。

- 日：午前0時から24時間
- 週：1週間
- 月：30日分

画面切り替えタブ
 ボタンをタップして画面を切り替えます。


データ出力
 「データ出力」画面で、期間を選択し、ユーザーのデータをPDF又は画像で出力します。

ボタン
 グラフ内のアイコンや線などの説明が表示されます。

グラフ
 体温測定値をグラフで表示します。(表示範囲を変更するには、グラフ表示部を左右にスクロールします。)

ボタン
 今日の日付を含む「月」のグラフを表示します。

(手入力) ボタン
 体温の測定値を手動で入力します。

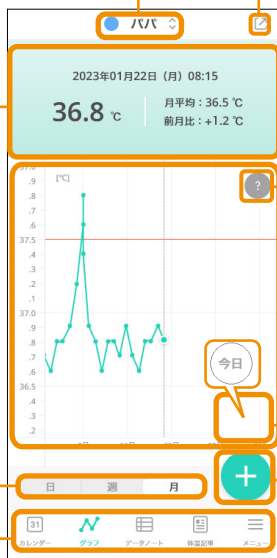

ボタン	表示画面
カレンダー	測定値カレンダー
グラフ	測定値グラフ
データノート	測定値リスト
体温記事	体温に関する情報サイトのリンク
メニュー	メニュー(アプリ設定やユーザー情報設定、登録機器等)

■ データノート画面

ユーザー選択

選択中のユーザー名が表示されます。◇をタップすると、登録ユーザーが一覧表示され、ユーザーを切り替えられます。

タイトル

以下の情報が表示されます。

- 平均体温：分析期間における平均体温を表示します。
- 体温の変動（最高）：分析期間における最高体温と平均体温の差を表示します。
- 体温の変動（最低）：分析期間における最低体温と平均体温の差を表示します。
- 分析期間：当月以前の3か月間

画面切り替えタブ

ボタンをタップして画面を切り替えます。

データ出力

「データ出力」画面で、期間を選択し、ユーザーのデータをPDF又は画像で出力します。

測定値リスト

体温測定日時、測定値、登録した気分（「普通」等）、症状（「頭痛」等）、イベント（「通院」等）を示すアイコンが表示されます。

表示範囲を変更するには：測定値リストには、上に最新の体温測定値が表示されています。上から下にスクロールして新しい日時の測定値を表示し、下から上にスクロールして古い日時の体温測定値を表示します。

+（手入力）ボタン

体温の測定値を手動で入力します。



ボタン	表示画面
カレンダー	測定値カレンダー
グラフ	測定値グラフ
データノート	測定値リスト
体温記録	体温に関する情報サイトのリンク
メニュー	メニュー（アプリ設定やユーザー情報設定、登録機器等）

基礎体温モード

■ カレンダー画面

ユーザー選択
 選択中のユーザー名が表示されます。◇をタップすると、登録ユーザーが一覧表示され、ユーザーを切り替えられます。

タイトル
 生理予定日と予定日までの日にち、排卵予定日と予定日までの日にち、妊娠可能性といつまで続くかが表示されます。

カレンダー切り替えタブ
 月又は年単位に切り替えます。

画面切り替えタブ
 ボタンをタップして画面を切り替えます。


データ出力
 「データ出力」画面で、期間を選択し、ユーザーのデータをPDF又は画像で出力します。

ボタン
 カレンダー内のアイコンの説明が表示されます。

カレンダー
 基礎体温測定や発熱の有無、生理・排卵予定・妊娠の可能性、イベント記録状況がカレンダーで確認できます。

今日ボタン
 今日の日付を含む「月」のカレンダーを表示します。

+(手入力) ボタン
 基礎体温の測定値を手動で入力します。

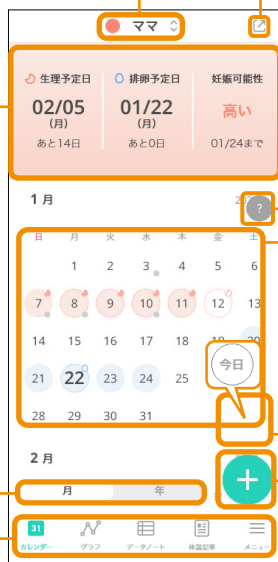

ボタン	表示画面
カレンダー	測定値カレンダー
グラフ	測定値グラフ
データノート	測定値リスト
体温記事	体温に関する情報サイトのリンク
メニュー	メニュー (アプリ設定やユーザー情報設定、登録機器等)

■ グラフ画面

ユーザー選択
 選択中のユーザー一名が表示されます。◇をタップすると、登録ユーザーが一覧表示され、ユーザーを切り替えられます。

タイトル
 当日の基礎体温測定日時と測定値を表示します。現在の周期、周期における状態の目安を表示します。

グラフ
 基礎体温測定値をグラフで表示します。(表示範囲を変更するには、グラフ表示部を左右にスクロールします。)

グラフ切り替えタブ
 以下の基礎体温グラフと測定値リストを表示します。

- 日：午前0時から24時間
- 週：「日」表示で選択した日からさかのぼって1週間
- 月：「日」表示で選択した日からさかのぼって1か月

画面切り替えタブ
 ボタンをタップして画面を切り替えます。

データ出力
 「データ出力」画面で、期間を選択し、ユーザーのデータをPDF又は画像で出力します。



ボタン
 グラフ内のアイコンや線などの説明が表示されます。

体温変化の比較ボタン
 過去3周期分の基礎体温推移の比較が表示されます。

青線
 低温期と高温期の境目となる目安を示します。

今日 ボタン
 今日の日付を含む「月」のグラフを表示します。

+ (手入力) ボタン
 基礎体温の測定値を手動で入力します。

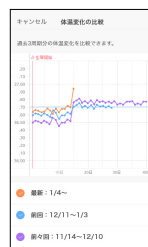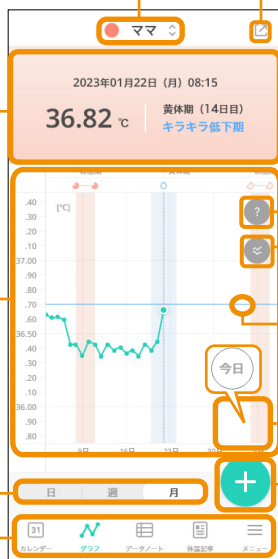

ボタン	表示画面
カレンダー	測定値カレンダー
グラフ	測定値グラフ
データノート	測定値リスト
体温記録	体温に関する情報サイトのリンク
メニュー	メニュー(アプリ設定やユーザー情報設定、登録機器等)

■ データノート画面

ユーザー選択

選択中のユーザー名が表示されます。◇をタップすると、登録ユーザーが一覧表示され、ユーザーを切り替えられます。

測定値リスト

基礎体温測定日時、測定値、登録した気分(「普通」等)、症状(「頭痛」等)、イベント(「通院」等)を示すアイコンが表示されます。表示範囲を変更するには：測定値リストには、上に最新の基礎体温測定値が表示されています。上から下にスクロールして新しい日時の測定値を表示し、下から上にスクロールして古い日時の基礎体温測定値を表示します。

画面切り替えタブ

ボタンをタップして画面を切り替えます。

データ出力

「データ出力」画面で、期間を選択し、ユーザーのデータをPDF又は画像で出力します。

タイトル

以下の情報が表示されます。

- 平均体温(低温期)：分析期間における平均体温(低温期)
- 平均体温(高温期)：分析期間における平均体温(高温期)
- 生理期間の平均：分析期間における生理期間の平均日数
- 高温期・低温期の体温差：分析期間における高温期平均体温と低温期平均体温の差
- 分析期間：直近の3周期

+ (手入力) ボタン

基礎体温の測定値を手動で入力します。



ボタン	表示画面
カレンダー	測定値カレンダー
グラフ	測定値グラフ
データノート	測定値リスト
体温記事	体温に関する情報サイトのリンク
メニュー	メニュー(アプリ設定やユーザー情報設定、登録機器等)

共通

■ 体温記事画面



テルモ体温研究所

ウェブサイトの「テルモ体温研究所」に移動します。
「発熱時に検温するだけのもの」から「日常をまもる検温」へ、をコンセプトに、体温と健康、発熱相談室、体温計の基礎知識、体温研究レポートなど、体温に関するさまざまな情報を提供しています。

基礎体温でカラダと話そう

ウェブサイトの「基礎体温でカラダと話そう」に移動します。
今が「わかる」と、未来が「かわる。」“わたし”のための基礎体温、をコンセプトに、基礎体温、月経（生理）、妊娠、婦人科疾患、更年期などのさまざまな基礎体温の情報を提供しています。

画面切り替えタブ

ボタンをタップして画面を切り替えます。

ボタン	表示画面
カレンダー	測定値カレンダー
グラフ	測定値グラフ
データノート	測定値リスト
体温記事	体温に関する情報サイトのリンク
メニュー	メニュー（アプリ設定やユーザー情報設定、登録機器等）

■ メニュー画面



データ管理

- 未取り込みデータ：未取り込みデータ数が表示されます。(P.37)
- データ出力 (P.42)
- 他アプリとの連携 (P.44)

ユーザー情報

- アカウント管理：IDとパスワードの変更ができます。(P.55)
- プロフィール管理：プロフィールの編集、表示モード（一般体温モード、基礎体温モード）の切り替えができます。(P.60)

アプリ設定

- 登録機器：登録されている機器が確認できます。(P.50)
- 家族・パートナー設定：管理ユーザーを登録できます。(P.46)
- セキュリティ設定：ログイン設定が変更できます。(P.62)

アプリについて

- アプリ情報：アプリバージョン、利用規約、プライバシーポリシーを確認できます。(P.64)
- かんたんガイド：チュートリアル動画を表示できます。(P.65)
- 詳しい使い方：アプリの利用方法等を確認できます。(P.65)
- お問い合わせ：困ったときの対処方法の確認、お問い合わせ（メール・お電話）ができます。(P.66)
- ログアウト (P.28)

画面切り替えタブ

ボタンをタップして画面を切り替えます。

ボタン	表示画面
カレンダー	測定値カレンダー
グラフ	測定値グラフ
データノート	測定値リスト
体温記録	体温に関する情報サイトのリンク
メニュー	メニュー（アプリ設定やユーザー情報設定、登録機器等）

ここでは、テルモたいおんアプリのインストール方法、新規アカウント登録方法、体温計とスマートフォンのペアリング方法について説明します。

アカウントを新規登録する

▶ 17

体温計とペアリングする

▶ 23


アカウントを新規登録する

テルモたいおんアプリをインストールし、初回ログイン時に、新規アカウントの登録（利用規約等の同意、メールアドレス・パスワードの設定、優先表示モードの選択、プロフィール登録）を行います。



1. 「テルモたいおんアプリ」をインストールする。

- Android：Google Play™ でインストールします。
- iOS：App Store でインストールします。

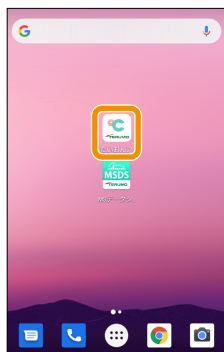

2. （テルモたいおんアプリ）をタップする。

テルモたいおんアプリが起動し、「こんにちは」画面が表示されます。

（備考） システムからメールが発行されるため、あらかじめ「@mail.taionapps-terumo.com」からのメールを受信できるようにドメイン拒否の解除をお願いします。

3. [次へ] をタップする。

利用規約とプライバシーポリシーの同意画面が表示されます。



利用規約とプライバシーポリシーをご確認いただき、同意をお願いします。

利用規約
プライバシーポリシー

☒ 利用規約に同意します。
☒ プライバシーポリシーに同意します。

☐ 将来の研究開発等の目的で私のデータが利用されることに同意します。

- ・データは個人が特定できない形で利用されます。
- ・いつでも自由にこの同意を撤回できます。
- ・詳細は、利用規約およびプライバシーポリシーの記載をご覧ください。

開始

4. [利用規約] と [プライバシーポリシー] をタップして内容を確認し、チェックボックスにチェックを付け、[開始] をタップする。

「アカウント登録」画面が表示されます。

- 【備考】**
- 利用規約、プライバシーポリシー画面の下の [同意して実行] をタップすると、前画面に戻り、チェックボックスにチェックが付きます。
 - 利用規約とプライバシーポリシーに同意されない場合は、本アプリをお使いいただけません。
 - 研究開発などの目的での利用に同意いただいた場合のみ、ご登録いただいたデータを弊社で使用させていただく場合があります。詳細については利用規約、プライバシーポリシーをご確認ください。

アカウント登録

利用を開始するために、新規アカウント登録をお願いします。アカウントを登録することで、データの引継ぎや復元を行うことができます。

taion@terumo.co.jp

パスワードは、8～99文字で入力できます。
1文字以上の大文字英字・小文字英字・数字の組み合わせで設定してください。
利用できる半角記号
~ ! , [] { } * ^ _ () = & % ^ & # \ / < > ' : ; _ = + *

新規アカウント登録

既存アカウントでログインする

5. 「メールアドレス」(ID)、「パスワード」、「パスワード(確認用)」を入力し、[新規アカウント登録] をタップする。

登録したメールアドレスに認証コードが記載されたメールが届きます。「認証コード」入力画面が表示されます。

- 【備考】**
- メディセーフデータシェア for Home のアカウントをお持ちの方は、同じメールアドレス(ID) とパスワードを使用することで、テルモたいおんアプリでもこれまで記録している体温を見ることができます。[既存アカウントでログインする] をタップしてください。
 - 利用可能な文字や文字数については、画面に表示されている説明に従ってください。

＜ 戻る 認証コード

ご登録いただいたメールアドレス宛に認証コードを送信しました。
届いたメールに記載された認証コードを入力して、登録を完了させてください。

登録されたメールアドレス
taion@terumo.co.jp

認証コード
123 456

認証コードを再送する

「@mail.meds-terumo.com」からのメールを受信できるよう設定をお願いします。

完了

6. 認証コードを入力し、[完了] をタップする。

「認証が完了しました！」画面が表示されます。

注 意

- 「認証コード」画面が表示されたら、アプリを閉じないでください。
- アプリを閉じてしまったとき、又は認証コードが正しくないと表示されるときは、[認証コードを再送する] をタップして、新しい認証コードを発行してください。

認証が完了しました！

次へ

7. [次へ] をタップする。

「はじめに」画面が表示されます。

はじめに

あなたのアプリの利用目的を教えてください。

一般体温の管理
小數点以下1桁の体温と体調などを記録

基礎体温の管理
小數点以下2桁の体温と生理周期などを記録
※どちらかを管理される方はこちらを選択してください

次へ

8. 優先表示モード（[一般体温の管理] 又は [基礎体温の管理]）を選択し、[次へ] をタップする。

アプリの利用目的により、優先表示モードを選択します。

- 一般体温モード：体温測定値、測定値の推移、発熱の有無、体調等のイベント記録状況を確認、分析する。
- 基礎体温モード：基礎体温測定値、測定値の推移、生理・排卵予定、生理周期、妊娠の可能性、体調などのイベント記録状況を確認、分析する。

「プロフィール登録」画面が表示されます。

9. プロフィールを登録する。

名前の登録画面が表示されます。

〔備考〕 [スキップ] をタップして、後ほどメニューの「プロフィール管理」で設定することもできます。

- 1) 名前部分をタップし、表示されるキーボードで名前を入力し、[完了] をタップする。

〔備考〕 名前を入力する際、記号はご使用になれませんのでご注意ください。

(記号例：- ; () ￥ & @ ! ')

入力した名前が名前部分に表示されます。ここで設定した名前はユーザー名としてアプリの画面に表示されます。

- 2) [次へ] をタップする。

性別の登録画面が表示されます。

- 3) [男性]、[女性]、又は [その他] のいずれかの性別を選択し、[次へ] をタップする。

生年月日の登録画面が表示されます。

- 〔備考〕**
- 前の画面に戻るには、[戻る] をタップします。
 - 位置情報へのアクセスを求める画面が表示される場合があります。その場合は、[許可] をタップしてください。
 - Bluetooth の使用を求める画面が表示される場合があります。その場合は、使用を許可してください。

戻る プロフィール登録

生年月日を教えてください。
内容はあとで変更もできます。

1992 年 6 月 15 日

スキップ

次へ

- 4) 生年月日部分をタップし、表示される年月日リストの「年」、「月」、「日」部分をそれぞれスクロールし、年、月、日の値を選択し、[完了] をタップする。

選択した値が「生年月日」部分に表示されます。

- 5) [次へ] をタップする。

身長登録画面が表示されます。

戻る プロフィール登録

身長を教えてください。
内容はあとで変更もできます。

160 cm

スキップ

次へ

- 6) 身長部分をタップし、表示されるリストをスクロールし、身長値を選択し、[完了] をタップする。

選択した値が「身長」部分に表示されます。

- 7) [次へ] をタップする。

- 一般体温モードの場合は、「プロフィールを登録しました！」画面が表示されます。これでアカウントのプロフィール登録は完了です。(手順 10 へ)
- 基礎体温モードの場合は、前回の生理日を登録する画面が表示されます。(手順 8) へ)

戻る プロフィール登録

前回の生理日はいつでしたか？
おおよそで大丈夫です。

生理開始日

2023 年 01 月 07 日

生理終了日

2023 年 01 月 11 日

開始日の入力がない場合は、初回の生理・排卵予定日の予測ができません。

スキップ

次へ

- 8) (基礎体温モードのみ)「生理開始日」の年月日部分をタップし、表示される年月日リストの「年」、「月」、「日」部分をそれぞれスクロールし、年、月、日の値を選択し、[完了] をタップする。

選択した値が「生理開始日」の年月日部分に表示されます。

- 9) (基礎体温モードのみ)「生理終了日」も 8) と同様に設定する。

- 10) [次へ] をタップする。

生理周期の登録画面が表示されます。

11) (基礎体温モードのみ) 生理周期の日数部分をタップし、表示されるリストをスクロールして値を選択し、[完了]をタップする。

選択した値が「生理周期」の日数部分に表示されます。生理周期日数は、以下から選択できます。

- 24 日以下
- 25 ~ 38 日
- 39 日以上

12) [次へ] をタップする。

「プロフィールを登録しました！」画面が表示されます。

10. [ペアリング開始] 又は [あとでペアリングをする] をタップする。

- [ペアリング開始] を選択した場合は、「ペアリング」画面が表示されます。対応する体温計を用意し、ペアリングを行います。(「体温計とペアリングする」(P.23))
- [あとでペアリングする] を選択した場合は、「ログイン」画面が表示されます。(「ログイン／ログアウトする」(P.27))

備考 メニューの「登録機器」でペアリングを行うことができます。(「機器を登録し、ユーザーに紐づける」(P.50))

体温計とペアリングする


測定データを取り込む為に、対応する体温計とペアリングし、体温計に紐づけるユーザーを登録します。



1. プロフィールの登録完了画面で、[ペアリング開始]をタップする。

ペアリングを開始するための準備画面が表示されます。


〔備考〕 [あとでペアリングする] を選択した場合は、メニューの「登録機器」画面でペアリングができます。（「機器を登録し、ユーザーに紐づける」(P.50)）

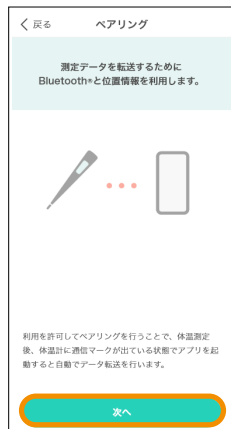

2. [次へ] をタップする。


ペアリングの開始画面が表示されます。

- 〔備考〕**
- 前の画面に戻るには、[戻る] をタップします。
 - お使いになる端末によって、表示される画面が異なります。
 - 位置情報へのアクセスを求める画面が表示される場合があります。その場合は、[許可] をタップしてください。
 - Bluetooth の使用を求める画面が表示される場合があります。その場合は、使用を許可してください。

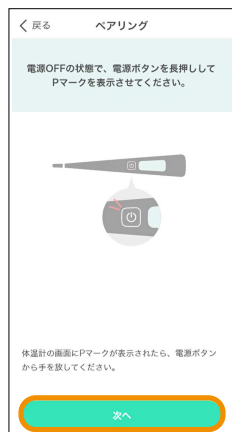

3. 画面の指示に従ってペアリングの操作を行い、体温計に「P」が表示されたら【次へ】をタップする。

- (備考)
- 体温計がペアリング可能な状態になると「P」が表示されます。
 - 前の画面に戻るには、[戻る] をタップします。

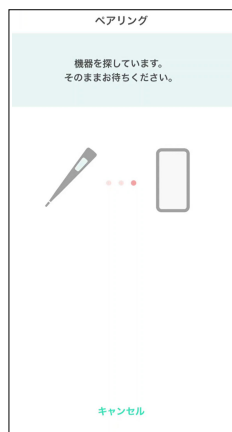


体温計の検索画面が表示されます。

- (備考)
- 操作を取り消すには[キャンセル]をタップします。「ペアリングをキャンセルしました」と表示されます。この画面からペアリングを再開できます。
 - 「ペアリングができませんでした」と表示された場合は、画面の指示に従って機器の対応状況や設定を確認し、[ペアリングを再開する] をタップします。
 - 登録できるのは、一般体温計、基礎体温計それぞれ5本までです。この本数を超えると「登録できる機器数を超えています」と表示されます。画面の指示に従って対応してください。
 - 体温計とのペアリングがうまくいかない場合は、各製品の電子添文、又は取扱説明書をご覧ください。



「ペアリング機器選択」画面が表示された場合は：
ペアリング対象の機器をタップします。

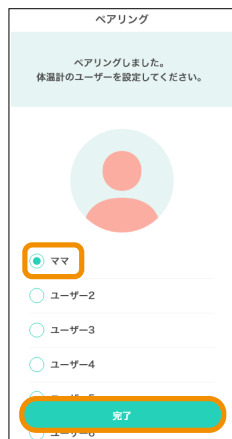

4. 体温計のユーザーを選択し、[完了] をタップする。 選択したユーザーが体温計に紐づけられます。

- 【備考】**
- 一般体温モードでご使用の場合は、複数人数でご利用することができます（最大 10 ユーザーまで）。1 ユーザーに一般体温計を複数設定することはできません。基礎体温モードの場合は、1 ユーザーのみで複数人数は登録できません。
 - 「紐づけられるユーザーがいません」と表示される場合は、画面の指示に従って対応してください。
 - 体温計から取り込まれたデータは、設定したユーザーのデータとして自動で振り分けられます。

ペアリングが成功すると、「ペアリングが完了しました！」画面が表示されます。



5. [利用開始] 又は [連続で機器をペアリングする] をタップする。

- [利用開始] を選択した場合は、「かんたんガイド (チュートリアル動画)」に遷移します。
- [追加で機器をペアリングする] を選択した場合は、ペアリングを開始するための準備画面が表示されます。手順 2 ～ 5 を操作し、追加の体温計のペアリングを実行します。

ここでは、テルモたいおんアプリにログインし、対応するテルモ体温計で体温を測定、体温測定値を記録する方法について説明します。また、測定値の手入力での追加、未取り込みデータの取り込み、測定値の編集・削除についても説明します。

ログイン／ログアウトする

ログインする

ログアウトする

▶ 27

体温測定値を記録する

体温計と連携し、測定データを保存する

体温測定値を手入力で追加する

未取り込みデータを取り込む

▶ 29

測定値の記録を編集・削除する


編集する

削除する

▶ 38

ログイン／ログアウトする

ログインする

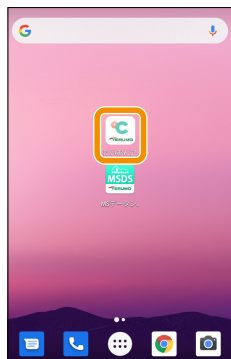

1.  **(テルモたいおんアプリ) をタップする。**
テルモたいおんアプリが起動し、「ログイン」画面が表示されます。

- 〔備考〕**
- 位置情報へのアクセスを求める画面が表示される場合があります。その場合は、[許可] をタップしてください。
 - Bluetooth の使用を求める画面が表示される場合があります。その場合は、使用を許可してください。



2. 「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、**[ログイン] をタップする。**

- 一般体温モード：グラフ画面が表示されます。
- 基礎体温モード：カレンダー画面が表示されます。

- 〔備考〕** 「次回以降ログイン設定」で「自動ログイン」を選択すると、次回起動時からメールアドレスとパスワードの入力が省けます。ログアウトすると、「メールアドレス」と「パスワード」の再入力が必要です。


ログイン方法を変更するには：

- 1)  をタップする。

「ログイン設定」画面が表示されます。選択可能なログイン方法が一覧表示されます。

- 2) ログイン方法をタップして選択する。

- 〔備考〕**
- ご使用の端末や環境によって、選択できるログイン方法は異なります。
 - ログイン方法は、メニューの「セキュリティ設定」からも変更が可能です。（「ログイン方法を変更する（セキュリティ設定）」（P.62））

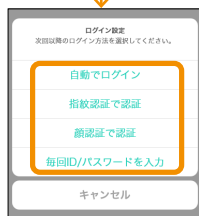

戻る パスワード忘れ

登録されているメールアドレス (ID) を入力してください。パスワード再設定のご案内をお送りします。

メールアドレス (ID)

メールアドレスを入力してください

TELMO メディセーフデータシェアをご利用の方は、メディセーフデータシェアのパスワードも同時に変更となりますのでご注意ください。

送信

パスワードを忘れた場合は：

- 1) 「パスワードを忘れた方はこちら」をタップする。
「パスワード忘れ」画面が表示されます。
- 2) メールアドレス (ID) を入力し、「送信」をタップする。
メールアドレスにパスワード変更のメールが届きます。手順に従ってパスワードを設定してください。詳しい操作方は、「パスワードを忘れたときは」(P.58) をご覧ください。

注意

メディセーフデータシェアをご利用の方は、メディセーフデータシェアのパスワードも変更になりますので、ご注意ください。

ログアウトする

メニュー

アプリ設定

登録機器

家族・パートナー設定

セキュリティ設定

アプリについて

アプリ情報

かんたんガイド

詳しい使い方

お問い合わせ

ログアウト

ホーム

設定

ヘルプ

ログアウト

1. をタップして表示されるメニュー 1 番下の「ログアウト」をタップする。

「ログアウトしますか？」と表示されます。

2. 「ログアウト」をタップする。

ログアウトしますか？

再度ログインするためにはIDとパスワードの入力が必要になります。登録データは削除されません。

キャンセル ログアウト

体温測定値を記録する

体温計と連携し、測定データを保存する



1. 体温計の電源を入れて、体温を測定する。

(備考) 実測検温する場合は、体温計が鳴っても取り出さず、そのまま検温を続けてください。再び体温計が鳴ったら、実測検温の終了です。体温計については、各製品の電子添文、又は取扱説明書をご覧ください。


2. 体温計をワキ又は口中から取り出す。

3. (テルモたいおんアプリ) を起動、ログインし、画面を表示する。

自動でデータ転送が始まります。データの転送が終わると「データ取り込み」画面が表示されます。

(備考)

- 体温計に残っているデータ数が多いと、データ転送に時間がかかります。しばらくお待ちください。
- データ転送中は、スマートフォンの電源は入れたままで、アプリの画面を開いてそのままお待ちください。
- 体温計に複数のユーザーが紐づけられている場合は、「データ取り込み」画面が表示されますが、紐づけが一人の場合は、表示されません。

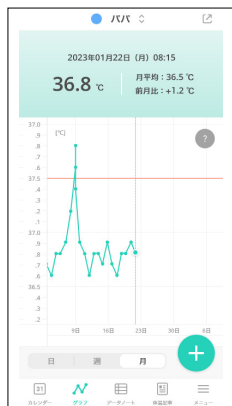



4. データを取り込む。

- 1) データを登録するユーザー名を確認する。

備考 登録するユーザーを必ず確認してください。ここで選択したユーザーの測定データとして保存されます。ユーザーを切り替えるには、ユーザー名の右の をタップします。

- 2) 取り込む個別のデータ又は「すべて選択」にチェックを付ける。

備考 すでに他のユーザーのデータとして登録されているデータには「[ユーザー名]で選択済み」と表示され、選択できません。

- 3) [データ取り込み] をタップする。

取り込みを開始します。データ取り込みが終わると、「データを取り込みました」画面が表示されます。

- 4) [閉じる] をタップする。

保存した測定データが、カレンダー、グラフおよびデータノートに追加されます。

- 備考**
- 体温測定値の保存が完了するまで画面を閉じずにお待ちください。
 - 「データ取り込み」画面で取り込まなかったデータは未取り込みデータとしてアプリ内に残ります。体温計には残りませんのでご注意ください。

データを削除するには：

- 1) 「データ取り込み」画面で削除する個別のデータ又は「すべて選択」にチェックを付け、[データを削除する] をタップする。
「選択したデータを削除しますか？」と表示されます。
- 2) [削除する] をタップする。
「データを削除しました」と表示されます。
- 3) [閉じる] をタップする。



体温測定値を手入力で追加する


■ 一般体温モード



1. 画面上のユーザー名を確認し、**+**（手入力）をタップする。

体温入力画面が表示されます。

- 〔備考〕** ユーザー名は必ず確認してください。
体温測定値を登録したいユーザーを切り替える場合は、「ユーザー」欄のユーザー名をタップし、「ユーザー」選択画面を表示します。登録したいユーザーをタップすると、選択したユーザーが「ユーザー」欄に表示されます。

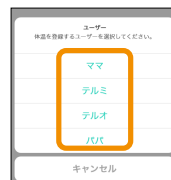

すでに当日の体温データが他にある場合は：

本日記録した体温が一覧表示されます。

「新規データ入力」をタップすると、体温入力画面が表示されます。


2. 体温測定値を入力する。

以下のいずれかの方法で測定値を入力します。

- 測定値部分をタップするか、**36.-**（36 度台）等をタップして、登録する体温の値を入力します。
- をタップして音声入力を起動し、体温の値を発声（例：36 テン、8 ド）します。音声画面に発生した体温の値が表示されたら、「完了」をタップします。

- 〔備考〕** 表示された値が正しくない場合は、「キャンセル」をタップして、体温の値を発声し直します。



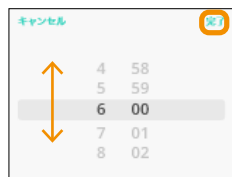

3. 測定時刻を登録する。

- 1) 「測定時刻」欄の時刻をタップする。
時刻設定画面が表示されます。
- 2) 上下にスクロールし、時刻を設定し、[完了] をタップする。
設定した時刻が「測定時刻」欄に表示されます。

〔備考〕 体温入力画面からはユーザーの変更はできません。
手順 1 の画面でユーザーを切り替えてから体温測定値の登録を行ってください。



4. 気分、症状、イベント、メモを登録し、[保存] をタップする。

- 1) 「気分」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。
- 2) 「症状」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。
〔備考〕 「気分」欄、「症状」欄に表示するアイコンを減らしたり、増やしたりできます。▷「入力項目（気分・症状アイコン）の編集」(P.36)
- 3) 「イベント」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。
- 4) 「メモ」欄をタップし、表示されるキーボードで体調など自由にメモを記入する。
- 5) [保存] をタップする。
「入力を保存しました」画面が表示されます。
- 6) [閉じる] をタップする。
登録内容が、カレンダー、グラフおよびデータノートに追加されます。


〔備考〕 「記録を削除する」をタップすると、登録内容が削除されます。

■ 基礎体温モード



1. 画面の **+** (手入力) をタップする。
基礎体温入力画面が表示されます。

(備考) 体温測定値を登録したいユーザーを切り替える場合は、「ユーザー」欄のユーザー名をタップし、「ユーザー」選択画面を表示します。登録したいユーザーをタップすると、選択したユーザーが「ユーザー」欄に表示されます。

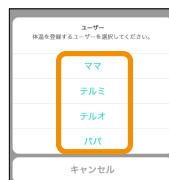

2. 基礎体温測定値を入力する。

以下のいずれかの方法で測定値を入力します。

- 測定値部分をタップするか、**36.-** (36 度台) 等をタップして、登録する体温の値を入力します。
- をタップして音声入力を起動し、体温の値を発声 (例: 36 テン、82 ド) します。音声画面に発生した体温の値が表示されたら、[完了] をタップします。




(備考) 表示された値が正しくない場合は、[キャンセル] をタップして、体温の値を発声し直します。



3. 測定時刻を登録する。

- 1) 体温測定値下の [測定値詳細] をタップする。
「測定時刻」と「ユーザー」が表示されます。
- 2) 「測定時刻」欄の時刻をタップする。
時刻設定画面が表示されます。
- 3) 上下にスクロールし、時刻を設定し、[完了] をタップする。
設定した時刻が「測定時刻」欄に表示されます。

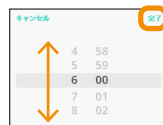

備考 この画面からはユーザーの変更はできません。手順1の画面でユーザーを切り替えてから体温測定値の登録を行ってください。

- 4) [測定値詳細] をタップして「測定時刻」と「ユーザー」表示を閉じる。



4. 生理の開始・終了を設定する。

生理が開始した場合は [開始]、生理が終了した場合は [終了] をタップしてください。

キャンセル 2023/1/22(月) ◯

気分

気分

症状

症状

生理痛

生理痛

経血量

経血量

おりもの

おりもの

記録を削除する

保存

5. 気分、症状、生理痛、経血量、おりもの、性交、イベント、メモを登録し、[保存] をタップする。

1) 「気分」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。

2) 「症状」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。

〔備考〕 「気分」欄、「症状」欄に表示するアイコンを減らしたり、増やしたりできます。▷「入力項目（気分・症状アイコン）の編集」（P.36）

3) 「生理痛」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。

4) 「経血量」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。

5) 「おりもの」欄で、当てはまる「量」、「質」、「色」のアイコンをタップして選択する。

キャンセル 2023/1/22(月) ◯

色

色

性交

性交

イベント

イベント

メモ

メモ

500文字以内で入力してください。

入力項目の設定

記録を削除する

保存

6) 「性交」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。

7) 「生理痛」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。

8) 「イベント」欄で、当てはまるアイコンをタップして選択する。

9) 「メモ」欄をタップし、表示されるキーボードで体調など自由にメモを記入する。

10) [保存] をタップする。

「入力を保存しました」画面が表示されます。

11) [閉じる] をタップする。

登録内容が、カレンダー、グラフおよびデータノートに追加されます。

〔備考〕 「記録を削除する」をタップすると、登録内容が削除されます。

■ 入力項目（気分・症状アイコン）の編集

「気分」欄、「症状」欄に表示するアイコンを選択することができます。



1. 体温入力・基礎体温入力画面の下部の「入力項目の設定」をタップする。

「入力項目の設定」画面が表示されます。



2. 「気分」欄と「症状」欄に表示するアイコンをタップして選び、「保存」をタップする。

- 1) 「気分」タブをタップする。
気分を示すアイコンが表示されます。
- 2) 「気分」欄に表示したいアイコンにチェックを付け、非表示にしたいアイコンのチェックを外す。
- 3) 「症状」タブをタップする。
症状を示すアイコンが表示されます。
- 4) 「症状」欄に表示したいアイコンにチェックを付け、非表示にしたいアイコンのチェックを外す。
- 5) 「保存」をタップする。
体温・基礎体温入力画面に戻ります。「気分」欄、「症状」欄に選択したアイコンが表示されます。

未取り込みデータを取り込む

アプリ内に未取り込みの体温測定値が残っている場合は、30 日後に自動で削除されます。必要な測定値がある場合は、削除前に以下の手順で未取り込みデータを取り込んでください。



1. をタップし、メニューから「未取り込みデータ」をタップする。

「未取り込みデータ」画面が表示されます。

【備考】 未取り込みデータがある場合は、メニューの「未取り込みデータ」の右に未取り込みデータ数と、タブのメニューアイコンの右上に、未取り込みデータがあることを示す「・」が表示されます。未取り込みデータが存在しない場合は、手順 2 の「未取り込みデータ」画面には何も表示されません。



2. データを取り込む。

- 1) データを登録するユーザー名を確認する。

【備考】 登録するユーザーを必ず確認してください。ここで選択したユーザーの測定データとして保存されます。ユーザーを切り替えるには、ユーザー名の右の をタップします。

- 2) 取り込む個別のデータ又は「すべて選択」にチェックを付ける。

【備考】 すでに他のユーザーのデータとして登録されているデータには「[ユーザー名] で選択済み」と表示され、選択できません。

- 3) 「データ取り込み」をタップする。

取り込みを開始します。データ取り込みが終わると、「データを取り込みました」画面が表示されます。

【備考】 「データを削除する」をタップすると、選択しているデータが削除できます。

- 4) 「閉じる」をタップする。

保存した測定データが、カレンダー、グラフおよびデータノートに追加されます。



測定値の記録を編集・削除する

編集する



1. データノート画面で編集したい記録を選択する。

選択した記録の測定値入力画面が表示されます。

- (備考)**
- カレンダー画面から記録を選択する場合は、編集したい日を選択します。
 - グラフ画面から記録を選択する場合は、**+** をタップして編集したい日と記録を選択します。
 - 転送データの体温値、時刻は編集できません。変更したい場合は、いったん削除して手入力で入力してください。



2. 編集したい項目をタップして、登録内容を修正し、[保存] をタップする。

1) 編集したい項目をタップする。

選択した項目の体温・基礎体温入力画面が表示されます。

2) 編集する。

編集方法は、以下の手入力手順と同じです。

- 一般体温モード: 「体温測定値を手入力で追加する」の「一般体温モード」(P.31) 手順 2 ~ 4
- 基礎体温モード: 「体温測定値を手入力で追加する」の「基礎体温モード」(P.33) 手順 2 ~ 5

3) 編集が終わったら、[保存] をタップする。

「入力を保存しました」画面が表示されます。

4) [閉じる] をタップする。

編集内容が、カレンダー、グラフおよびデータノートに追加されます。

削除する




1. データノート画面で削除したい記録を選択する。

選択した記録の測定値入力画面が表示されます。

- 【備考】**
- カレンダー画面から記録を選択する場合は、削除したい記録のある日付を選択します。
 - グラフ画面から記録を選択する場合は、 をタップして削除したい日と記録を選択します。

データノート画面で削除するには：

- 1) データノート画面で削除したい記録を左にスワイプする。
[削除] ボタンが表示されます。
- 2) [削除] をタップする。
「選択したデータを削除しますか？」と表示されます。
- 3) [はい] をタップする。
「データを削除しました」と表示されます。
- 4) [OK] をタップする。
選択した記録が削除されます。

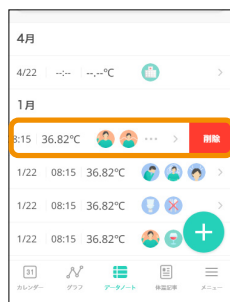

2. 画面を下にスクロールし、[記録を削除する] をタップする。

「選択したデータを削除しますか？」と表示されます。

- 1) [はい] をタップする。
「データを削除しました」と表示されます。
- 2) [OK] をタップする。
選択した記録が削除されます。

ここでは、データ出力、他アプリとの連携、ユーザー・機器管理方法、ID・パスワードの設定、表示モード・ログイン方法の変更、アプリのアップデート・アンインストール、その他の情報の確認について説明します。

データを出力する

▶ 42

他アプリとデータ連携する

Apple ヘルスケアとデータ連携する (iOS)

Google™ ヘルスコネクトとデータ連携する (Android)

▶ 44

ユーザーを管理 (追加・編集・削除) する

管理ユーザーを追加する

管理ユーザーを編集する

管理ユーザーを削除する

▶ 46

機器を管理 (登録・設定・削除) する

機器を登録し、ユーザーに紐づける

登録機器を設定する

登録機器を削除する

▶ 50

アカウントを設定する

ID（登録メールアドレス）を変更する

パスワードを変更する

パスワードを忘れたときは

アカウントを削除する

▶ 55

表示モードなどのプロフィールを確認、変更する

▶ 60

ログイン方法を変更する（セキュリティ設定）

▶ 62

アプリをアップデート・アンインストールする

アプリをアップデートする

アプリをアンインストールする

▶ 63

その他の情報を確認する

アプリの情報を確認する

アプリの使用方法を閲覧する

お問い合わせ方法を確認する


▶ 64

データを出力する

記録したデータ、グラフについて、出力期間を選択し、PDF 又は画像で出力します。

1. ユーザーを選び、表示する。

備考 ユーザーを切り替えるには、ユーザー名の右の をタップし、表示されるユーザー一覧から出力したいユーザーを選択します。

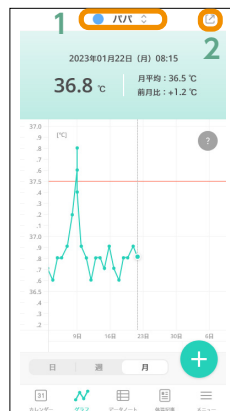

2. 画面右上の をタップする。又は をタップし、**「データ出力」** をタップする。 「データ出力」画面が表示されます。



3. 「出力期間」で、出力したい期間にチェックを付ける。
4. 「出力形式」で、出力形式（画像・PDF）にチェックを付ける。

5. 「出力」をタップする。

「データを出力しました」と表示されます。

6. 「閉じる」をタップする。

選択した期間の体温測定データが画像又は PDF で出力されます。

7. 保存されたデータを確認する。

画像又は PDF で出力した体温測定データは、以下に保存されています。

キャンセル データ出力

ママのデータとグラフを出力します。

出力期間

☐ 1か月

☐ 2か月

☐ 3か月

☒ 4か月

出力形式

☐ 画像

☒ PDF

出力

	画像で出力した場合	PDF で出力した場合
iOS 版	「写真」アプリ内	「ファイル」 > 「ブラウズ」の順にタップし、「この iPhone 内」又は「iCloud Drive」にある「ダウンロード」フォルダ内
Android 版	「ギャラリー」又は「アルバム」「フォト」アプリ内	「(マイ) ファイル」 > 「ダウンロード」フォルダ内

他アプリとデータ連携する

1 ユーザーでのご使用の場合に役立つ連携機能です。

Apple ヘルスケアとデータ連携する (iOS)

1. をタップし、[他アプリとの連携] をタップする。
[他アプリとの連携] 画面が表示されます。

- (備考)
- ヘルスケアアプリの操作方法については、ヘルスケアアプリのヘルプ等を参照してください。
 - ヘルスケアアプリの画面やボタンの名称は本取扱説明書での説明とは異なる場合があります。
 - ヘルスケアアプリとの連携を解除した場合は、ヘルスケアアプリに書き込んだテルモたいおんアプリの測定データはそのまま残ります。
 - 体温値が未入力の場合、「生理開始・生理終了」の月経データについては、ヘルスケアアプリに書き込まれません。



2. 「Apple ヘルスケアへデータを書き込み」を ON にする。

ヘルスケアアプリが起動し、テルモたいおんアプリへのアクセス許可を求める画面が表示されます。

- (備考) 複数ユーザーを登録の場合、たいおんアプリに登録されている全データが送信されますのでご注意ください。

3. ヘルスケアアプリの画面で、データ連携設定を行う。

- 1) 「アプリおよびサービス」の画面で「たいおんアプリ」を選択する。
- 2) すべてをオンにする、又は書き込みたい項目をオンにする。
テルモたいおんアプリの「他アプリと連携」画面に戻ります。

4. [全データを書き込む] をタップする。

「Apple ヘルスケアへのすべての測定データの書き込みを開始しますか?」と表示されます。

5. [開始する] をタップする。

テルモたいおんアプリからヘルスケアアプリへデータが書き込まれます。全データの書き込みが終了すると、「すべての測定データを書き込みました」と表示されます。

6. [閉じる] をタップする。



Google™ ヘルスコネクトとデータ連携する (Android)

1. をタップし、[他アプリとの連携] をタップする。
「他アプリとの連携」画面が表示されます。

- 【備考】**
- ヘルスコネクトアプリの操作方法については、ヘルスコネクトアプリのヘルプ等を参照してください。
 - ヘルスコネクトアプリの画面やボタンの名称は本取扱説明書での説明とは異なる場合があります。
 - ヘルスコネクトアプリとの連携を解除した場合は、ヘルスコネクトアプリに書き込んだテルモたいおんアプリの測定データはそのまま残ります。
 - 「生理開始」の月経データは、「生理終了」が入力された際、同時にヘルスコネクトアプリへ書き込まれます。



2. 「Google ヘルスコネクトへデータを書き込み」をONにし、「ヘルスコネクトへ」をタップする。
ヘルスコネクトアプリが起動し、テルモたいおんアプリにアクセス許可を求める画面が表示されます。

- 【備考】** 複数ユーザーを登録の場合、たいおんアプリに登録されている全データが送信されますのでご注意ください。

3. ヘルスコネクトアプリの画面で、データ連携設定を行う。

- 1) アプリ名 (たいおんアプリ) を確認する。
- 2) すべて許可をオンにする、又は書き込みたい項目を許可し、[許可] をタップする。

4. [全データを書き込む] をタップする。

「Google ヘルスコネクトへのすべての測定データの書き込みを開始しますか?」と表示されます。

5. [開始する] をタップする。

テルモたいおんアプリからヘルスコネクトアプリへデータが書き込まれます。全データの書き込みが終了すると、「すべての測定データを書き込みました」と表示されます。

6. [閉じる] をタップする。



ユーザーを管理（追加・編集・削除）する

管理ユーザーを追加する

自分の他にパートナー、家族など、テルモたいおんアプリで管理できる「管理ユーザー」を1アカウントにつき最大10名まで登録できます。

1. をタップし、[家族・パートナー設定] をタップする。

「管理するユーザー」画面が表示されます。

備考 管理ユーザー登録を代行する場合は、登録を代行される方が、ユーザーに「利用規約」・「プライバシーポリシー」に同意いただいたことをご確認ください。




2. [管理ユーザーを登録する] 又は [管理ユーザーを追加する] をタップする。

「管理ユーザー追加」画面が表示されます。



備考

- 初めて管理ユーザーを登録する場合は、右の画面が表示されます。[管理ユーザーを登録する] をタップします。
- すでに管理ユーザーが登録されている場合は、登録管理ユーザー一覧が表示されます。この場合は、[管理ユーザーを追加する] をタップします。

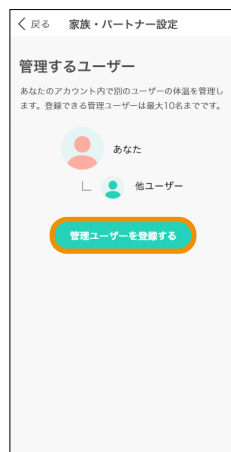

3. 追加したい管理ユーザーの情報を登録する。

- 1) 「お名前（表示名）」をタップし、ユーザーの表示名を入力する。
- 2) 「ユーザーカラー」をタップし、表示される「ユーザーカラー」画面で登録したいカラーをタップする。
- 3) 「優先表示モード」をタップし、表示される「表示モード」画面で登録したい優先表示モードをタップする。
- 4) 「登録」をタップする。

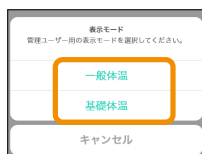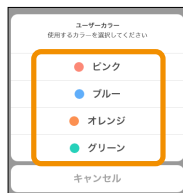

管理ユーザー追加

管理ユーザーを登録する
追加したいメンバーの情報を入力してください。

お名前（表示名） 表示名を入力してください

ユーザーカラー 一般体温

優先表示モード 一般体温

登録

4. 「体温計の設定をする」又は「体温計の設定をせずに完了」をタップする。

- 「体温計の設定をする」を選択した場合は、「登録機器」画面が表示されます。新しく登録した体温計、又は既に登録している体温計にユーザーを紐づけすることができます。
- 「体温計の設定をせずに完了」を選択した場合は、画面が閉じ、メニューを表示する前の画面に戻ります。

登録が完了しました！

管理ユーザーの登録が完了しました。
総じて、登録機器の一覧から、データを取り込む体温計を選択して、紐づけユーザーの設定を行ってください。

体温計の設定をする

体温計の設定をせずに完了

管理ユーザーを編集する


1. をタップし、[家族・パートナー設定] をタップする。

「管理するユーザー」画面が表示されます。登録した管理ユーザーが一覧表示されます。

2. 編集したい管理ユーザーをタップする。

「管理ユーザー設定」画面が表示されます。

(備考) メニュー画面に戻るには、[戻る] をタップします。

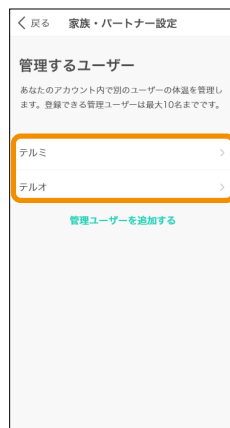

3. 管理ユーザーの設定を編集する。

- 1) 「お名前 (表示名)」のユーザー名部分をタップし、変更する。
- 2) 「ユーザーカラー」をタップし、表示される「ユーザーカラー」画面で変更したいカラーをタップする。



- 3) 「優先表示モード」をタップし、表示される「表示モード」画面で登録したい優先表示モードをタップする。



- 4) [保存] をタップする。



管理ユーザーを削除する

- 【備考】**
- 管理ユーザーを削除すると、登録情報や体温データも削除され、復元できません。
 - 体温計に紐づいている唯一のユーザーは削除できません。体温計を他のユーザーに紐づけた後、削除してください。

1. をタップし、[家族・パートナー設定] をタップする。

「管理するユーザー」画面が表示されます。

2. 登録した管理ユーザー一覧から、削除したい管理ユーザーをタップする。

「管理ユーザー設定」画面が表示されます。

【備考】 メニュー画面に戻るには、[戻る] をタップします。

「管理するユーザー」画面で削除するには：

- 1) 「管理するユーザー」画面で、削除したい管理ユーザー行を左にスワイプする。

[削除] ボタンが表示されます。

- 2) [削除] をタップする。

「管理ユーザーを削除しますか？」と表示されます。

- 3) [削除する] をタップする。


選択した管理ユーザーと登録情報、測定値データが削除されます。

3. [管理ユーザーを削除する] をタップする。

「管理ユーザーを削除しますか？」と表示されます。

4. [削除する] をタップする。

選択した管理ユーザーと登録情報、測定値データが削除されます。

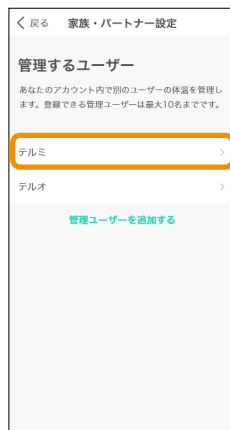

機器を管理（登録・設定・削除）する

機器を登録し、ユーザーに紐づける

体温計をペアリング、登録し、ユーザーに紐づけることができます。

1. をタップし、**「登録機器」** をタップする。
「登録機器」画面が表示されます。

（備考） 本アプリに対応する体温計を、一般体温計、基礎体温計ともにそれぞれ5本まで登録できます。



2. **「機器を登録する」** 又は **「機器を追加する」** をタップする。

体温計とのペアリングを開始するための準備画面が表示されます。


- （備考）**
- 初めて体温計をペアリングする場合は、右の画面が表示されます。**「機器を登録する」** をタップします。
 - すでに機器が登録（ペアリング）されている場合は、登録機器一覧が表示されます。この場合は、**「機器を追加する」** をタップします。



3. [次へ] をタップする。

ペアリングの開始画面が表示されます。


- 備考**
- 前の画面に戻るには、[戻る] をタップします。
 - お使いになる端末によって、表示される画面が異なります。
 - 位置情報へのアクセスを求める画面が表示される場合があります。その場合は、[許可] をタップしてください。
 - Bluetooth の使用を求める画面が表示される場合があります。その場合は、使用を許可してください。

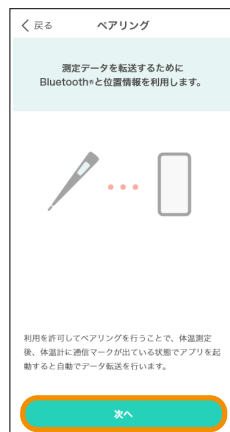

4. 画面の指示に従ってペアリングの操作を行い、体温計に「P」が表示されたら [次へ] をタップする。

体温計の検索画面が表示されます。

- 備考**
- 体温計がペアリング可能な状態になると「P」が表示されます。
 - 前の画面に戻るには、[戻る] をタップします。
 - 体温計の検索画面で操作を取り消すには [キャンセル] をタップします。「ペアリングをキャンセルしました」と表示されます。ここからペアリングを再開できます。
 - 「ペアリングができませんでした」と表示された場合は、画面の指示に従って機器の対応状況や設定を確認し、[ペアリングを再開する] をタップします。
 - 登録できる本数を超えると「登録できる機器数を超えています」と表示されます。
 - 体温計とのペアリングがうまくいかない場合は、各製品の電子添文、又は取扱説明書をご覧ください。

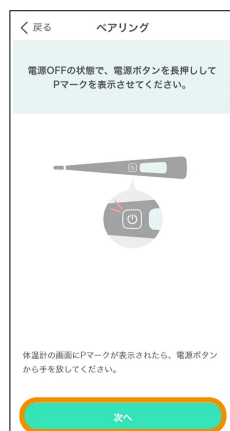

5. 「ペアリング機器選択」画面が表示された場合は、ペアリング対象の機器をタップする。

ペアリングが成功すると、「登録機器設定」画面が表示されます。



6. 紐づけるユーザーを登録する。

- 1) 表示されるリストから紐づけたいユーザーにチェックをつける。

- (備考)
- 1本の一般体温計には最大で10名のユーザーを紐づけできます。
 - 1本の基礎体温計に紐づけられるユーザーは1名のみです。

- 2) [完了] をタップする。

設定した内容で機器が登録されます。「登録機器」画面が表示され、登録された体温計が一覧表示されます。



「登録機器」画面から設定を変更・機器を削除するには：

- 機器の設定を変更する場合は、「登録機器を設定する」(P.53) の手順に従って操作を行います。
- 機器を削除する場合は、「登録機器を削除する」(P.54) の手順に従って操作を行います。



登録機器を設定する

1. をタップし、[登録機器] をタップする。
「登録機器」画面が表示されます。登録した機器が一覧表示されます。
2. 登録機器一覧から、設定したい機器をタップする。
「登録機器設定」画面が表示されます。



3. 機器の設定を変更し、[保存] をタップする。

- 1) 「機種名」、「追加日」、「最終同期」の内容を確認する。
(備考)
 - 機種名、追加日、最終同期の記載は、ユーザーが変更することはできません。
 - メニュー画面に戻るには、[キャンセル] をタップします。

- 2) 「名称」を確認する。
変更する場合は、名前部分をタップし、名前を変更します。
- 3) 「ユーザーの紐づけ」で体温計に紐づけられているユーザーを確認する。

選択したいユーザーにチェックを付け、選択解除したいユーザーのチェックを外します。

- (備考)
- 1本の一般体温計には最大で10名のユーザーを紐づけできます。
 - 1本の基礎体温計に紐づけられるユーザーは1名のみです。

- 4) [保存] をタップする。
設定した内容で機器が登録されます。



登録機器を削除する

1. **メニュー** をタップし、**[登録機器]** をタップする。
「登録機器」画面が表示されます。登録した機器が一覧表示されます。

2. **登録機器一覧から、削除したい機器をタップする。**
「登録機器設定」画面が表示されます。

「登録機器」画面で削除するには：

- 1) 「登録機器」画面で、削除したい機器行を左にスワイプする。
[削除] ボタンが表示されます。
- 2) [削除] をタップする。
「機器を削除しますか？」と表示されます。
- 3) [削除する] をタップする。
「機器を削除しました」と表示されます。
- 4) [閉じる] をタップする。
選択した機器が削除されます。



3. **[機器を削除する] をタップする。**
「機器を削除しますか？」と表示されます。

備考 メニュー画面に戻るには、[キャンセル] をタップします。

4. **[削除する] をタップする。**
「機器を削除しました」と表示されます。

5. **[閉じる] をタップする。**
選択した機器が削除されます。



アカウントを設定する

ID（登録メールアドレス）を変更する

1.  をタップし、[アカウント管理] をタップする。
「アカウント管理」画面が表示されます。

備考 システムからメールが発行されるため、あらかじめ
「@mail.taionapps-terumo.com」からのメールを受信
できるようにドメイン拒否の解除をお願いします。



2. [ID（登録メールアドレス）の変更] をタップする。
「アカウント変更」画面が表示されます。

注 意

メディセーフデータシェアをご利用の方は、メディセーフデータシェアの ID も変更になりますので、ご注意ください。



3. 「新しい ID（メールアドレス）」にメールアドレスを入力し、[送信] をタップする。

登録したメールアドレスに認証コードが記載されたメールが届きます。「認証コード」入力画面が表示されます。

< 戻る
アカウント変更

ID（登録メールアドレス）の変更を行います。
新しいアドレスを入力してください。

現在のID（メールアドレス）

taion@terumo.co.jp

新しいID（メールアドレス）

メールアドレスを入力してください

テルモ メディセーフデータシェアをご利用の際は、メ
ディセーフデータシェアのIDも同時に変更となります
のでご注意ください。

送信

4. 認証コードを入力し、[完了] をタップする。

「メールアドレス（ID）の変更を完了しました」と表示されます。

5. [OK] をタップする。

メールアドレスが変更され、「ログイン」画面が表示されます。新しいメールアドレスでログインしてください。

< 戻る
認証コード

ご登録いただいたメールアドレス宛に認証コードを送
信しました。
届いたメールに記載された認証コードを入力して、登
録を完了させてください。

登録されたメールアドレス

taion@terumo.co.jp

認証コード

123 456

認証コードを再送する

「@mail.msds-terumo.com」からのメールを受信で
きるよう設定をお願いします。

完了

パスワードを変更する

1.  をタップし、[アカウント管理] をタップする。
「アカウント管理」画面が表示されます。

2. [パスワードの変更] をタップする。
「パスワードの変更」画面が表示されます。

注意

メディセーフデータシェアをご利用の方は、メディセーフデータシェアのパスワードも変更になりますので、ご注意ください。



3. 「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード（確認用）」を入力し、[変更] をタップする。

「パスワードを変更しました」と表示されます。

- 備考**
- 現在のパスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた方] をタップしてください。「パスワード忘れ」画面が表示されます。「パスワードを忘れたときは」(P.58) の手順に従ってパスワードを設定してください。
 - 利用可能な文字や文字数については、画面に表示されている説明に従ってください。

4. [閉じる] をタップする。

パスワードが変更され、「ログイン」画面が表示されます。



パスワードを忘れたときは

- 1. 「ログイン」画面で「パスワードを忘れた方はこちら」、又は「アカウント管理」の「パスワード変更」画面で「パスワードを忘れた方」をタップする。
「パスワード忘れ」画面が表示されます。

- 2. メールアドレス(ID)を入力し、[送信]をタップする。
登録したメールアドレスに認証コードが記載されたメールが届きます。「パスワード再設定」画面が表示されます。

備考 システムからメールが発行されるため、あらかじめ「@mail.taionapps-terumo.com」からのメールを受信できるようにドメイン拒否の解除をお願いします。

注 意

メディセーフデータシェアをご利用の方は、メディセーフデータシェアのパスワードも変更になりますので、ご注意ください。

戻る

パスワード忘れ

登録されているメールアドレス (ID) を入力してください。パスワード再設定のご案内をお送りします。

メールアドレス (ID)

メールアドレスを入力してください

ヘルプ

メディセーフデータシェアをご利用の方は、メディセーフデータシェアのパスワードも同時に変更となりますのでご注意ください。

送信

- 3. 「認証コード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード (確認用)」を入力し、[変更]をタップする。
「パスワードの再設定を完了しました」と表示されます。

備考 利用可能な文字や文字数については、画面に表示されている説明に従ってください。

- 4. [OK] をタップする。
パスワードが再設定され、「ログイン」画面が表示されます。

戻る

パスワード再設定

ご登録いただいたメールアドレス宛に認証コードを送信しました。
届いたメールに記載された認証コードと新しいパスワードを入力してください。

登録されたメールアドレス

taion@terumo.co.jp

認証コード

123 456

認証コードを再送する

「@mail.msds-terumo.com」からのメールを受信できるよう設定をお願いします。

新しいパスワード

.....

.....

パスワードは、8～99文字で入力できます。
1文字以上の大文字英字・小文字英字・数字の組み合わせで設定してください。
利用できる半角記号
^\$*._[]{}()*?~!@#%&/\.,><';|_-`~+=-`

変更

アカウントを削除する

1.  **メニュー**をタップし、**[アカウント管理]** をタップする。
「アカウント管理」画面が表示されます。
2. **[アカウントを削除する]** をタップする。
「アカウントを削除しますか？」と表示されます。

注意

- アカウントを削除すると、アカウントに保存されたすべての管理ユーザーも削除されます。また、アカウントと管理ユーザーが登録した測定データもすべて削除され、復元できませんのでご注意ください。
- メディセーフデータシェアをご利用の方は、メディセーフデータシェアのアカウント、テルモたいおんアプリとメディセーフデータシェアで登録したデータもすべて削除され、復元できませんのでご注意ください。



アカウント管理

ID (登録メールアドレス)

talon@terumo.co.jp

ID (登録メールアドレス) の変更

パスワード

パスワードの変更

アカウントを削除する

備考 削除を中止するには、**[キャンセル]** をタップします。

3. **[削除する]** をタップする。
「アカウントを削除しました」と表示されます。
4. **[閉じる]** をタップする。
アカウント、アカウントが登録した管理ユーザー、アカウントと管理ユーザーのデータがすべて削除されます。

表示モードなどのプロフィールを確認、変更する

アカウント登録時に設定した優先表示モードの他、氏名、ユーザーカラーなどのプロフィールを確認、変更することができます。

1. をタップし、[プロフィール管理] をタップする。
「プロフィール管理」画面が表示されます。



2. プロフィールを確認し、必要な場合は変更する。

- 「お名前（表示名）」を変更する場合は、名前部分をタップし、表示されるキーボードで名前を入力し、[完了] をタップします。
- 「性別」を変更する場合は、[男性]、[女性]、又は[その他] のいずれかをタップします。
- 「生年月日」を変更する場合は、生年月日部分をタップし、表示される年月日リストの「年」、「月」、「日」部分をそれぞれスクロールし、年、月、日の値を選択し、[完了] をタップします。
- 「身長」を変更する場合は、身長部分をタップし、表示されるリストをスクロールし、身長値を選択し、[完了] をタップします。



- 「ユーザーカラー」を変更する場合は、ユーザーカラー部分をタップし、表示される「ユーザーカラー」画面で登録したいカラーをタップします。

〔備考〕 設定を中止して元の画面に戻るには、[キャンセル]をタップします。



- 「優先表示モード」を変更する場合は、優先表示モード部分をタップし、表示される「表示モード」画面で登録したい優先表示モードをタップします。

〔備考〕 設定を中止して元の画面に戻るには、[キャンセル]をタップします。



- 「連携機器」では、現在紐づけされている機器の確認ができます。

〔備考〕 変更する場合は、メニューの「登録機器」を選択し、各体温計の設定で「ユーザーの紐づけ」を変更してください。（「機器を登録し、ユーザーに紐づける」(P.50)）

3. [保存] をタップする。

「入力を保存しました」と表示されます。

ログイン方法を変更する（セキュリティ設定）

次回以降のログイン方法を変更できます。

1. をタップし、[セキュリティ設定] をタップする。
「セキュリティ設定」画面が表示され、現在のログイン方法が表示されます。



2. ログイン設定行をタップする。

「ログイン設定」画面が表示されます。選択可能なログイン方法が一覧表示されます。


- (備考)
- ご使用の端末や環境によって、選択できるログイン方法は異なります。
 - ログイン方法は、「ログイン」画面からも変更が可能です。（「ログインする」(P.27)）



3. 次回起動時から使用したいログイン方法をタップする。

選択したログイン方法が、「ログイン設定」に表示されます。

- (備考)
- 設定を中止して元の画面に戻るには、「ログイン設定」画面で [キャンセル] をタップします。
 - 右の画面は表示例です。お使いの機種によっては、選択できる項目が異なります。

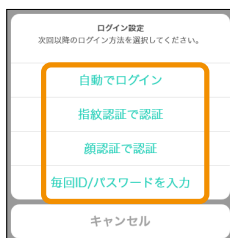

アプリをアップデート・アンインストールする

アプリをアップデートする

テルモたいおんアプリの新しいバージョンがリリースされると、バージョンアップのお知らせが表示されます。以下の手順で、アップデートを行ってください。


1. [アップデート] をタップする。

アプリのアップデートが開始します。

2. 画面に表示される指示に従って、アップデートを行う。

アップデートが終了すると、完了画面が表示されます。

3. [閉じる] をタップする。

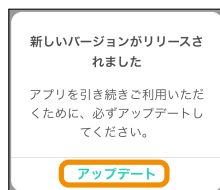

アプリをアンインストールする

1. スマートフォンのホーム画面で (テルモたいおんアプリ) を長押しする。


「×アプリを削除」と「 アンインストール」などが表示されます。

備考 アプリの削除、アンインストール表示は、お使いの機種や環境によって異なります。詳しくはお使いのスマートフォンのマニュアルをご覧ください。

2. アンインストール操作を行う。

アンインストール確認画面が表示されたら、[はい] をタップします。アプリがスマートフォン本体から完全に消去されます。

備考 アンインストール操作はお使いの機種や環境によって異なります。詳しくはお使いのスマートフォンのマニュアルをご覧ください。

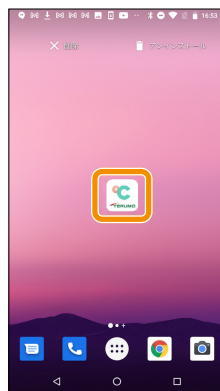

その他の情報を確認する

アプリのバージョン、利用規約、プライバシーポリシー、かんたんガイド、詳しい使い方、お問い合わせ先を表示し、確認できます。


アプリの情報を確認する

1. をタップし、[アプリ情報] をタップする。
「アプリ情報」画面が表示されます。



2. アプリの情報を確認、閲覧したい情報をタップする。

- [バージョン]：アプリのバージョン番号が表示されています。
- [利用規約]：タップすると、「利用規約」画面が表示されます。[戻る] をタップすると「アプリ情報」画面に戻ります。
- [プライバシーポリシー]：タップすると、「プライバシーポリシー」画面が表示されます。[戻る] をタップすると「アプリ情報」画面に戻ります。
- データ利用の同意：説明を確認し、同意できる場合のみチェックを付けます。

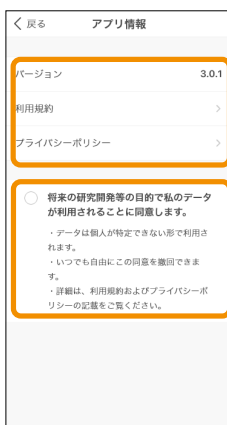

(備考) メニュー画面に戻るには [戻る] をタップします。

アプリの使用方法を閲覧する

- メニュー** をタップし、閲覧したい情報をタップする。
 - 「かんたんガイド」：テルモたいおんアプリのチュートリアル動画を表示したいときに選びます。「かんたんガイド」画面が表示されます。
 - 「詳しい使い方」：テルモたいおんアプリの利用方法や困ったときの対処方法を表示したいときに選びます。「詳しい使い方」画面が表示されます。



2. 使用方法を閲覧する。

- 「かんたんガイド」を選んだ場合は、チュートリアル動画が表示されます。「次へ」をタップして再生を続けます。終了すると「かんたんガイド」画面に戻ります。



- 「詳しい使い方」を選んだ場合は、「詳しい使い方」のWeb ページが表示されます。画面を上下にスワイプして説明を表示します。

備考 メニュー画面に戻るには「戻る」をタップします。

お問い合わせ方法を確認する


1. をタップし、[お問い合わせ] をタップする。
「お問い合わせ」画面が表示されます。



2. お問い合わせ方法を確認する。

お問い合わせの前にご確認いただきたい事、メールやお電話でのお問い合わせについてご案内しています。
メールでのお問い合わせについては、「アプリから問い合わせる」(P.68) をご覧ください。

(備考) メニュー画面に戻るには[戻る]をタップします。

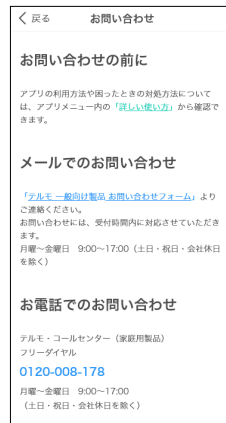

ここでは、アプリからの問い合わせ方法、お問い合わせ窓口、困ったときの対処方法、エラーメッセージ一覧について説明します。

アプリから問い合わせる

▶ 68

お問い合わせ窓口

▶ 69

こんなときは

▶ 69

製品についてのご相談やお問い合わせは

▶ 73

アプリから問い合わせる

1. をタップし、[お問い合わせ] をタップする。
「お問い合わせ」画面が表示されます。


2. [テルモ 一般向け製品 お問い合わせフォーム] を
タップする。

Web ブラウザが起動し、「一般のお客様向け製品に関するお問い合わせ」画面が表示されます。

- (備考)
- システムからメールが発行されるため、あらかじめ「@mail.taionapps-terumo.com」からのメールを受信できるようにドメイン拒否の解除をお願いします。
 - メニュー画面に戻るには[戻る]をタップします。



3. 「一般のお客様向け製品に関するお問い合わせ」画面で、「お問い合わせの前に」の内容をご確認の上、
画面を下にスクロールする。
「お問い合わせ内容」欄が表示されます。

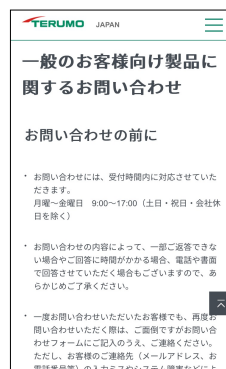

4. 「お問い合わせ内容」欄に問い合わせ内容を記載する。

5. [上記に合意の上、送信] をタップする。

お問い合わせが送信され、登録メールアドレス宛てに問い合わせ実施のメールが届きます。お問い合わせ内容の回答まで、しばらくお待ちください。



お問い合わせ窓口

テルモたいおんアプリの操作について、お困りのときには、まず次項の「こんなときは」をご覧ください。それでも解決しない場合は、テルモ・コールセンターにお問い合わせください。



https://www.terumo.co.jp/general_product_inquiries/input

こんなときは

症状	原因	対処方法
アプリがインストールできない。	動作環境が合っていない。	「動作環境 / 仕様」(P.7) を参照し、適切な環境でインストールしてください。
	インストールに失敗している。	アンインストール後、再度、インストールしてください。
アプリにログインできない。	ログイン ID が誤っている。	「アカウントを新規登録する」(P.17) で登録したアカウントのログイン ID (メールアドレス) とパスワードを確認してください。
	パスワードを紛失した。	以下の操作でパスワードを再設定してください。 1) 「ログイン」画面の「パスワードをお忘れの方」をタップする。 2) 「パスワード忘れ」画面でメールアドレスを入力し、「送信」をタップする。 3) 「パスワード再設定」画面で、メールで届いた「認証コード」、「新しいパスワード」を 2 回入力し、「変更」をタップする。
	ログイン ID を紛失した。	再発行はできませんので紛失しないようにご注意ください。紛失した場合は、新規登録をお願いいたします。
	ログインアカウントの登録が削除されている。	アカウントの再登録を行ってください。
	インターネット環境がない。	テルモたいおんアプリの使用には、インターネット環境が必要です。インターネット環境でご使用ください。

症状	原因	対処方法
体温計と通信ができない。	体温計が対応機種でない。	対応機種については、「メニュー」画面から「詳しい使い方」を選択し「対応機種」を確認してください。又はテルモウェブサイトをご覧ください。
	iOS 版：ペアリング、通信ができない。	「設定」から「たいおんアプリ」を選択し、Bluetooth がオフになっていないか確認してください。
	Android 版：ペアリングができていない。	「メニュー」の「登録機器」から再ペアリングを実施してください。スマートフォンにすでにペアリング情報がある場合、スマートフォンの Bluetooth 設定に対象機種（P210、W210）が表示されているときは、ペアリング再設定を実施する前に体温計情報を削除してください。
	体温計の電源が入っていない。	体温計の電源が入っているか、ご確認ください。入っていない場合は、電源を入れてください。
認証コードが入力できない。	認証コードを発行したが、メールが届かない。	- 迷惑メールとして振り分けられていないかメールボックスをご確認ください。 - 認証コードを送付したメールアドレスがアプリ画面に表示されますので、正しいメールアドレスかご確認ください。
	メールの URL をタップした時に認証画面に遷移できない。	端末によって遷移しない場合がございます。アプリを閉じずに認証コードの入力をお願いいたします。
表示がおかしい。	カレンダー、時刻の表示がおかしい。	iOS 版：[設定] > [一般] > [日付と時刻] から、「24 時間表示」を ON にしてください。

エラーメッセージ一覧

表示エラーメッセージ	対処方法
## のデータを取り込めませんでした	体温計が近くにあり、電源が ON になっていることをご確認のうえ、もう一度お試しください。
データ取り込みに失敗しました	もう一度お試しください。
転送データの編集はできません	手入力のデータのみ編集可能です。
アカウントを登録できませんでした／ アカウントを削除できませんでした	通信環境をご確認のうえ、再度お試しください。
認証コードを再送できませんでした	通信環境をご確認のうえ、再度お試しください。
ID（メールアドレス）を変更できませんでした	通信環境をご確認のうえ、再度お試しください。
パスワードを変更できませんでした／ パスワードの再設定ができませんでした	通信環境をご確認のうえ、再度お試しください。
Apple ヘルスケアがインストールされていません	データの連携を行うには、[ストアへ] をタップして、ストアからインストールしてください。
Google ヘルスコネクトがインストールされていません	データの書き込みを行うためには、[ストアへ] をタップして、ストアからインストールしてください。
機器削除に失敗しました／（機器設定の編集時）変更内容の保存に失敗しました	もう一度お試しください。
ユーザー ID・パスワードに誤りがあるか、登録がありません	連続で失敗した場合、一時的にアクセスが制限されることがあります。時間を空けてからもう一度お試しください。
通信エラーが発生しました	通信環境をご確認のうえ、再度お試しください。
問題が発生しました	もう一度お試しください。
プロフィール登録ができませんでした／（プロフィール編集時）変更内容を保存できませんでした	通信環境をご確認のうえ、再度お試しください。
この体温計は既に登録されています	スマートフォンの設定から Bluetooth 接続された体温計情報を削除し、テルモたいおんアプリから再度登録してください。

表示エラーメッセージ	対処方法
Apple ヘルスケアでデータの書き込みが許可されていません	データを Apple ヘルスケアアプリに書き込む場合は、次の手順でアクセスを許可してください。 設定＞ヘルスケア＞データアクセスとデバイス＞たいおんアプリ＞書き込み許可
Google ヘルスコネクトでデータの書き込みが許可されていません	データを Google ヘルスコネクトアプリに書き込む場合は、次の手順でアクセスを許可してください。 ヘルスコネクト トップ画面＞アプリの権限＞たいおんアプリ＞書き込み許可
他の端末からアカウントが削除されました	再度アカウント登録を行ってください。
他の端末からアカウント情報が変更されました	再度ログインしてください。
入力内容を保存できませんでした	通信環境をご確認のうえ、再度お試しください。
データの書き込みができませんでした	通信環境をご確認のうえ、再度お試しください。
データ出力できませんでした	通信環境をご確認のうえ、再度お試しください。

製品についてのご相談やお問い合わせは、
テルモ・コールセンターまでご連絡ください。



記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。

Android、Google、Google Play は米国 Google LLC. の商標または登録商標です。

Apple、iPhone、App Store、iCloud は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

iOS は米国およびその他の国における Cisco System, Inc. および / またはその関連会社の商標または登録商標です。

Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。



テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号